

Cabinet engagé,  
patients en sécurité.



the plus of pure  
performance





### schülke en quelques chiffres :

- Plus de 125 ans d'expérience et d'expertise dans le domaine de l'hygiène
- 1991 : création de la filiale schülke en France
- 1996 : intégration dans la branche santé du groupe Air Liquide
- 2007 : distribution des produits à base d'acide peracétique de Bioxal à l'hôpital
- Plus de 1000 employés
- Plus de 70 personnes dédiées à la recherche et au développement
- 200 spécialités produites dans notre usine de Norderstedt | Allemagne ou par Bioxal à Chalon sur Saône | France
- 80 pays couverts par nos filiales et notre réseau de distribution



**1889 |**  
Création de la société par R. Schülke et J. Mayr à Hambourg.  
Lancement du 1<sup>er</sup> désinfectant de marque : Lysol



**1892 |**  
Une épidémie de choléra endiguée à Hambourg grâce au Lysol

## Depuis plus de 125 ans, l'hygiène est notre cœur d'activité



Notre société fabrique des produits pharmaceutiques, des cosmétiques, des dispositifs médicaux et des biocides : antiseptiques, désinfectants, produits d'hygiène et conservateurs.

**Notre mission : la protection des hommes et des produits contre les risques d'infection et de contamination.**



Dans un monde ouvert, où les hommes et les marchandises circulent de plus en plus facilement d'un bout à l'autre de la planète, les risques de transmission des micro-organismes pathogènes sont souvent sous-estimés. Nous en faisons notre quotidien.

Bien qu'il y ait une réelle prise de conscience quant à l'importance de l'hygiène, la mise en place des procédures reste parfois complexe. C'est pourquoi, nous proposons pour chaque secteur d'activité, une large gamme de produits de qualité, des services de formation et de conseil associés. Notre politique de Gestion de la Qualité est primordiale et s'applique à toutes les activités de schülke.

Nos Systèmes de Gestion de la Qualité et de Gestion Environnementale sont certifiés ISO 9001, ISO 14001 et aussi ISO 13485 (norme spécifique à la production de dispositifs médicaux).

Certains de nos produits sont fabriqués selon les normes GMP (*Good Manufacturing Practices*), spécifiques aux produits pharmaceutiques.

Filiale du groupe Air Liquide Santé depuis 1996, nous partageons avec conviction la philosophie de notre maison mère : **apporter des solutions toujours plus innovantes pour faciliter et améliorer la qualité des soins et le bien-être du patient.**

### Développement durable et responsabilité environnementale

Nous sommes engagés pour une gestion durable et responsable de nos ressources naturelles, de notre environnement et de notre santé.

Notre système de management environnemental lancé en 1996 sous-tend toutes nos activités au quotidien et nos efforts sont régulièrement récompensés par les instances environnementales allemandes et internationales.

Nos produits sont biodégradables (conformément à la norme OCDE 301D) et nos matériaux d'emballage sont recyclables.

schülke est une société certifiée EMAS (Eco Management and Audit Scheme).



1913 |  
Lancement du Sagrotan,  
le 1<sup>er</sup> désinfectant ménager de marque



1920 |  
Introduction d'une formulation  
destinée à combattre la tuberculose

# Hygiène et désinfection : le choix schülke

schülke : la solution « hygiène » pour votre cabinet dentaire

Il est aujourd'hui communément admis que **la prévention** est la meilleure approche possible pour offrir au patient et à l'équipe soignante une qualité de soins optimale et ce **en toute sécurité**.

Les bonnes pratiques et procédures d'hygiène sont désormais bien connues des praticiens et des assistantes dentaires. Mais la mise en place de ces procédures soulève de multiples interrogations : comment optimiser mon organisation ? Comment choisir les désinfectants ? Quelles sont les normes en vigueur ? Comment arbitrer entre volonté de bien faire et contraintes de temps ?

**schülke met toute son expertise au service des cabinets dentaires et propose une gamme de produits garantissant une efficacité, une rapidité d'action et une sécurité d'utilisation optimales.**

En tant qu'experts de l'hygiène, nous proposons également toute une palette de services allant du conseil à des formations très complètes sur l'hygiène au cabinet dentaire\*.

**Notre objectif : une hygiène et une sécurité parfaites dans votre cabinet, pour la sécurité des patients et de toute l'équipe dentaire.**

Qualité. Sécurité. Schülke.



Une documentation complète et pratique pour vous accompagner au quotidien...  
N'hésitez pas à nous contacter ou à les télécharger directement sur notre site internet :  
[www.schuelke.fr](http://www.schuelke.fr)

\* Nos protocoles, conseils et formations sont conformes aux recommandations du « Guide de prévention des infections liées aux soins en chirurgie dentaire et en stomatologie », Deuxième édition, Ministère de la santé, DGS, juillet 2006



1996 |  
Acquisition de Schülke & Mayr  
par le groupe Air Liquide



1997 |  
Lancement de la nouvelle SHA  
Desderman® N

**schülke** →

2008 |  
119 ans déjà et une nouvelle jeunesse  
avec le nouveau logo Schülke



# Une gamme complète dédiée à l'hygiène du cabinet dentaire



1950 | Introduction d'un désinfectant antiviral



1975 | Gigasept® : 1<sup>er</sup> désinfectant efficace sur HBV



1989 | Lancement d'Octenisept® : antiseptique pour les muqueuses et les plaies

# Normalisation des produits schülke

Les produits désinfectants doivent être choisis avec soin, le critère principal étant évidemment l'efficacité anti-microbienne.

Il est nécessaire de vérifier que l'efficacité du produit respecte bien les normes européennes EN en vigueur.

Il existe des normes validant différents niveaux d'efficacité bactéricide, virucide, fongicide et mycobactéricide.

		Bactéricide	Virucide	Fongicide	Mycobactéricide
	desderman® pure	EN 1040:1997 EN 13727+A1:2013 EN 1500:2013 EN 12791:2005	EN 14476:2013	EN 1275:2006 <i>C. albicans</i> EN 13624:2013 <i>C. albicans</i>	EN 14348:2005
	desderman® pure gel	EN 1040:2006 EN 13727+A1:2013 EN 1500:2013 EN 12791:2005	EN 14476:2013	EN 1275:2006 EN 13624:2013 <i>C. albicans</i>	EN 14348:2005
	primasept® med	EN 1040:2006 SARM	HIV, HBV, Papovavirus SV40	EN 1275:2006 <i>A. niger</i>	EN 14348:2005
	gigasept® instru AF	EN 13727+A1:2013 EN 14561:2006	Adénovirus, Rotavirus, Virus de la Vaccine, Polyomavirus SV40	EN 13624:2013 EN 14562:2006	EN 14348:2002 EN 14563:2002
	rotasept®	EN 1040:1997 EN 13727+A1:2013 EN 14561:2006	EN 14476:2013	EN 1275:1997 EN 13624:2013 <i>C. albicans</i> EN 14562:2006 <i>C. albicans</i>	EN 14348:2005 EN 14563:2009
	gigasept® enzymatic	EN 1040:1997 EN 13727:2004	HIV, HBV	EN 1275:1997 <i>C. albicans</i>	
	gigasept® FF	EN 13727+A1:2013 EN 14561:2006	EN 14476:2013	EN 14562:2006 <i>C. albicans</i> EN 13624:2013 <i>C. albicans</i>	EN 14348:2005 EN 14563:2009
	septinol® SA mikrozid® AF lingettes	EN 1040:1997 EN 13727+A1:2013 EN 14561:2006 EN 16615:2015	HBV, HIV, HCV, Adénovirus, Rotavirus, Virus de la Vaccine, Polyomavirus SV40, Norovirus murin, Calicivirus félin	EN 1275:1997 EN 13624:2013 <i>C. albicans</i> EN 14562:2006 EN 16615:2015	EN 14348:2005 EN 14563:2006
	mikrozid® sensitive wipes mikrozid® sensitive liquid	EN 1040:1997 EN 13727+A1:2013 EN 13697:2001 EN 14561:2006 EN 16615:2015	HBV, HIV, HCV, Rotavirus, Virus de la Vaccine, Polyomavirus SV40, Norovirus murin	EN 1275:1997 <i>C. albicans</i> EN 13624:2013 <i>C. albicans</i> EN 14562:2006 EN 16615:2015	
	mikrozid® universal wipes mikrozid® universal liquid	EN 13727+A1:2013 EN 16615:2015	HBV, HIV, HCV, Adénovirus, Rotavirus, Polyomavirus SV40, Norovi- virus murin	EN 13624:2013 <i>C. albicans</i> EN 16615:2015	EN 14348:2005
	terralin® protect	EN 1040:1997 EN 13727+A1:2013 EN 13697:2001 EN 16615:2015	HBV, Adénovirus, Rotavirus, Virus de la Vaccine, Polyomavirus SV40, Calicivirus félin	EN 1275:1997 EN 13624:2013 <i>C. albicans</i> EN 13697:2001 EN 16615:2015	
	aspirmatic®	EN 1040:1997 EN 13727+A1:2013 EN 14561:2006	HBV, HIV, HCV, Virus de la Vaccine	EN 1275:1997 <i>C. albicans</i> EN 13624:2013 EN 14562:2006	
	dentavon®	EN 1040:1997 EN 13727+A1:2013	EN 14476:2013	EN 1275:1997 <i>C. albicans</i> EN 13624:2013 <i>C. albicans</i>	

Nouveau



# Lavage et désinfection des mains


schülke : la solution à portée de main

Au quotidien, l'hygiène des mains est une des procédures d'hygiène les plus importantes. En contact permanent avec les instruments et les patients, vos mains doivent être désinfectées efficacement.

La grande majorité des infections nosocomiales sont dues à des germes transmis par contact manuel. Cela signifie qu'une hygiène stricte des mains est la meilleure solution pour diminuer les risques d'infections croisées.

Nos produits offrent de très larges spectres d'efficacité microbologique, validés selon les normes européennes en vigueur.

Ils conviennent à tous types de peau et présentent une excellente tolérance cutanée. N'oublions pas qu'une peau saine et bien hydratée reste votre meilleure alliée contre les agressions microbiennes.

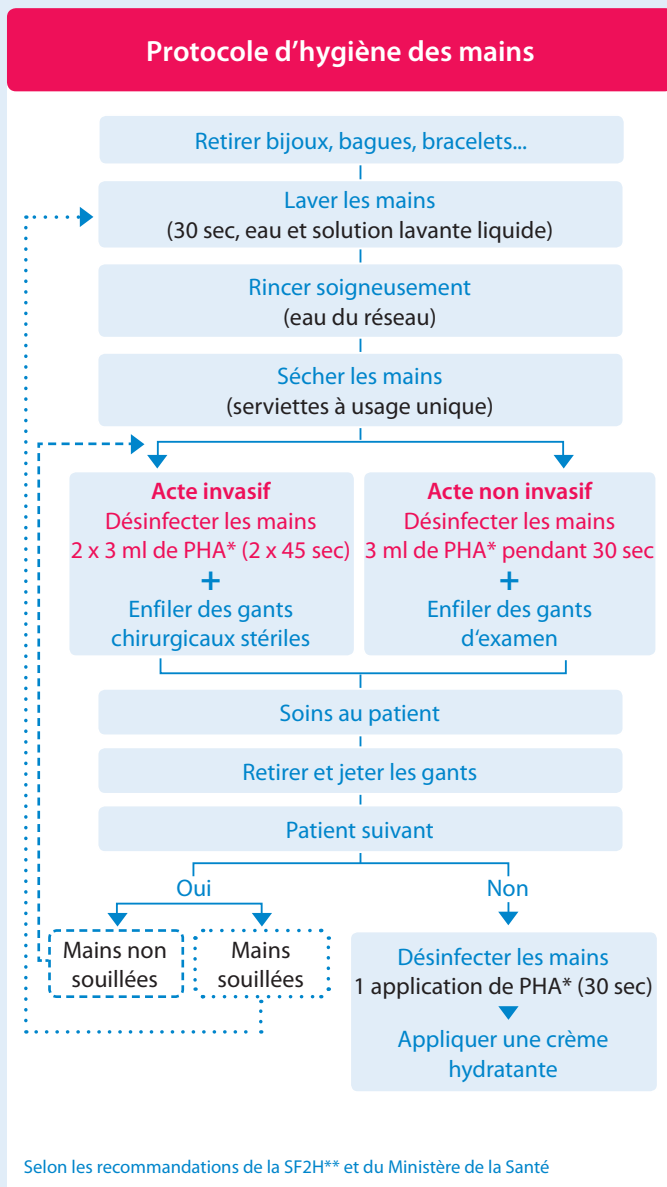

\* Produit Hydro-Alcoolique  
\*\* Société Française d'Hygiène Hospitalière

# Lavage et désinfection des mains

## Savon chirurgical

### primasept® med

Savon liquide désinfectant



#### Les + schülke

- Excellentes propriétés nettoyantes
- Large spectre d'efficacité
- Bonne tolérance cutanée (huile de coprah)

#### Activité microbiologique

**Bactéricide** : EN 1040:2006, SARM

**Fongicide** : EN 1275:2006 A. niger

**Mycobactéricide** : EN 14348:2005

**Virucide** : HIV, HBV, Papovavirus SV40

#### Conditionnement

1 l (10 flacons par carton)

5 l (unité)

#### Référence

184 808

184 814

- **Composition** : huile de coprah, acides gras, propanols, biphénols

## Savons doux

Bientôt disponible avec  
pompe montée



### esemtan® washlotion

Lotion lavante

#### Les + schülke

- Sans savon, contient un agent favorisant la régénération de la peau
- Convient aux peaux normales ou délicates
- Parfum frais et agréable
- Testé dermatologiquement

#### Conditionnement

1 l (10 flacons par carton)

1 l - hyclick (10 flacons par carton)

5 l (unité)

#### Référence

116 602

70000133

116 604

- **Composition** : lactate de sodium, surfactants anioniques



### s&m® washlotion

Lotion lavante pour peaux normales ou délicates

#### Les + schülke

- Sans savon ni alcalins, pH neutre
- Nettoyage efficace en douceur
- Préserve le film hydro-lipidique de la peau

#### Conditionnement

1 l (10 flacons par carton)

- **Composition** : sulfate de sodium, sulfate de magnésium

#### Référence

112 002

Bientôt disponible avec  
pompe montée



### sensiva® washlotion

Lotion lavante douce sans parfum

#### Les + schülke

- Sans savon
- Particulièrement bien tolérée par la peau
- Sans parfum, sans colorant, sans lanoline
- Favorise la régénération et l'hydratation de la peau
- Testé dermatologiquement

#### Conditionnement

1 l airless (6 flacons par carton)

1 l - hyclick (10 flacons par carton)

#### Référence

114 012

70000137

- **Composition** : chlorure de sodium, biguanide, allantoine

## Soin des mains



### esemtan® baume

Crème de soin et protection des mains

#### Les + schülke

- Pénètre vite et hydrate durablement
- Testé sous contrôle dermatologique
- Sans colorant

#### Conditionnement

150 ml (30 flacons par carton)

- **Composition** : paraffine liquide, alcool cétéarylique, propylène glycol

#### Référence

109 603



# Lavage et désinfection des mains

## Produits hydro-alcooliques



### desderman® pure

Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains

#### Les + schülke

- Sans parfum et sans colorant : diminue les risques de réaction allergique
- Sèche vite et ne colle pas (facilite l'enfilage des gants)
- Les mains sont douces grâce à la présence d'émollients dans la composition
- Très large spectre virucide (Adénovirus, Norovirus, Poliovirus) et entérobactéries résistantes (EBLSE)

#### Activité microbiologique

**Bactéricide :** EN 1040:1997, EN 13727+A1:2013, EN 1500:2013, EN 12791:2005

**Fongicide :** EN 1275:2006 *C. albicans*, EN 13624:2013 *C. albicans*

**Virucide :** EN 14476:2013

**Mycobactéricide :** EN 14348:2005

**Traitement hygiénique des mains (EN 1500:2013) :** 3 ml / 30 sec

**Désinfection chirurgicale des mains (EN 12791:2005) :** 2 x 3 ml / 2 x 45 sec

#### Conditionnement

Conditionnement	Référence
100 ml (30 flacons par carton)	116 821
1 l (10 flacons par carton)	116 808
1 l airless (6 flacons par carton)	116 812
5 l (unité)	116 810

- **Composition :** éthanol, propan-2-ol, 2-biphényl



### desderman® pure gel

Gel hydro-alcoolique pour la désinfection des mains

#### Les + schülke

- Sans parfum et sans colorant : diminue les risques de réaction allergique
- Sèche vite et ne colle pas (facilite l'enfilage des gants)
- Les mains sont douces grâce à la présence d'émollients dans la composition
- Très large spectre virucide (Adénovirus, Norovirus, Poliovirus) et entérobactéries résistantes (EBLSE)
- Flacon 500 ml pompe montée : 1 pression délivre 3 ml !

#### Activité microbiologique

**Bactéricide :** EN 1040:2006, EN 13727+A1:2013, EN 1500:2013, EN 12791:2005

**Fongicide :** EN 1275:2006, EN 13624:2013 *C. albicans*

**Virucide :** EN 14476:2013

**Mycobactéricide :** EN 14348:2005

**Traitement hygiénique des mains (EN 1500:2013) :** 3 ml / 30 sec

**Désinfection chirurgicale des mains (EN 12791:2005) :** 2 x 3 ml / 2 x 45 sec

#### Conditionnement

Conditionnement	Référence
100 ml (30 flacons par carton)	126 908
500 ml pompe montée (20 flacons par carton)	126 909
1 l (10 flacons par carton)	126 903
1 l airless (6 flacons par carton)	126 911

- **Composition :** éthanol, propan-2-ol, 2-biphényl

## Technique recommandée pour l'application des PHA\* (gel ou solution)

Respecter la méthode standard de friction pour le traitement hygiénique des mains en 7 étapes.



1. Frotter paume contre paume



2. Paume contre le dos de la main opposée, doigts entrelacés



3. Paume contre paume, doigts entrelacés



4. Dos des doigts contre la paume opposée, doigts emboîtés



5. Friction circulaire du pouce



6. Friction en rotation du bout des doigts dans la paume opposée



7. Friction circulaire du poignet



Vidéo disponible

\* Produit Hydro-Alcoolique

Produits biodégradables (OCDE 301D) / Emballages recyclables.  
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



# Nettoyage et désinfection des instruments

schülke : des instruments désinfectés et brillants

La pratique dentaire implique de nombreux actes invasifs, l'utilisation d'instruments et de matériels spécifiques. Le nettoyage et la désinfection des instruments nécessitent des solutions hautement efficaces et adaptées à chaque type de matériel.



Concentrées ou prêtes à l'emploi, les solutions schülke offrent de très larges spectres d'activité afin de garantir une efficacité optimale en un minimum de temps, facilitant ainsi les procédures d'hygiène.

Nous sommes aussi particulièrement attentifs à la matéro-compatibilité de nos solutions : **l'intégrité et la brillance de vos instruments dentaires sont pour nous tout aussi importantes que le pouvoir nettoyant et désinfectant de nos produits.**

Tous nos produits subissent donc de nombreux tests de matéro-compatibilité avant leur mise sur le marché.



# Nettoyage et désinfection des instruments

## Désinfection

### gigasept® instru AF - DM classe IIb

Solution concentrée, détergente et désinfectante pour les instruments dentaires

#### Les + schülke

- Solution efficace pendant 7 jours !
- Très large spectre d'activité dont une activité mycobactéricide
- Excellente détergence, ravive la brillance des instruments
- Actif en 15 min en bac statique et en 5 min en bac à ultrasons (à 3 %)
- Dilution de 1,5 à 3 % selon le temps de contact désiré (jusqu'à 333 l de solution)

#### Activité microbiologique

**Bactéricide :** EN 13727+A1:2013, EN 14561:2006

**Fongicide :** EN 13624:2013, EN 14562:2006

**Mycobactéricide :** EN 14348:2002, EN 14563:2002

**Virucide :** Adénovirus, Rotavirus, Virus de la Vaccine, Polyomavirus SV40

#### Conditionnement

2 l (5 flacons par carton)

5 l (unité)

#### Référence

107 421

107 422

- **Composition :** dérivés de biguanide, phénoxypropanols, chlorure de benzalkonium

**Utilisation :** diluer le produit, laisser tremper et rincer. Solution stable 7 jours. En cas de salissures importantes, changer la solution. Si utilisée en cuve à ultrasons, changer la solution tous les jours.



### rotasept® - DM classe IIb

Solution prête à l'emploi, nettoyante et désinfectante pour les fraises

#### Les + schülke

- Sans rinçage
- Efficace en 5 min en bac à ultrasons et en 15 min en bac statique
- Excellente matérieo-compatibilité
- Contient des agents anticorrosion

#### Activité microbiologique

**Bactéricide :** EN 1040:1997, EN 13727+A1:2013, EN 14561:2006

**Fongicide :** EN 1275:1997, EN 13624:2013 *C. albicans*, EN 14562:2006 *C. albicans*

**Mycobactéricide :** EN 14348:2005, EN 14563:2009

**Virucide :** EN 14476:2013

#### Conditionnement

2 l (5 flacons par carton)

5 l (unité)

#### Référence

104 741

104 742

- **Composition :** propanol, dérivés alcalins, éthylhexanol

**Utilisation :** s'utilise pur, laisser tremper, pas besoin de rincer. Changer la solution tous les jours.



### gigasept® enzymatic - DM classe IIb

Détergent et désinfectant en poudre pour les instruments dentaires

#### Les + schülke

- Excellent pouvoir détergent
- Très économique : dilution à 0,5 %
- Efficace contre le biofilm

#### Activité microbiologique

**Bactéricide :** EN 1040:1997, EN 13727:2004

**Fongicide :** EN 1275:1997 *C. albicans*

**Virucide :** HIV, HBV

#### Conditionnement

Seau de 2 kg (4 seaux par carton)

#### Référence

103 206

- **Composition :** enzymes, tensioactif non ionique, ammonium quaternaire

**Utilisation :** diluer le produit, laisser tremper et rincer. Solution stable 1 journée.

Seau de 2kg !



## Désinfection de haut niveau

### gigasept® FF - DM classe IIb

Solution nettoyante désinfectante de haut niveau des instruments chirurgicaux et thermosensibles

#### Les + schülke

- Sans formaldéhyde
- Produit sporicide
- Solution active pendant 14 jours

#### Activité microbiologique

**Bactéricide :** EN 13727+A1:2013, EN 14561:2006

**Fongicide :** EN 13624:2013 *C. albicans*, EN 14562:2006 *C. albicans*

**Mycobactéricide :** EN 14348:2005, EN 14563:2009

**Virucide :** EN 14476:2013

**Sporicide :** *C. difficile*

#### Conditionnement

2 l (5 flacons par carton)

#### Référence

125 502

- **Composition :** dialdéhyde succinique, dimathoxyte trahydrofuran

**Utilisation :** diluer le produit, laisser tremper et rincer. Solution active pendant 14 jours.

Sans formaldéhyde !

Produits biodégradables (OCDE 301D) / Emballages recyclables.

Marquage CE DQS 0297

DM fabriqués ou mandatés par Schülke & Mayr GmbH<sup>1</sup>.

Utiliser les DM avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



# Nettoyage et désinfection des instruments

## Traitement de l'instrumentation en thermo-désinfecteur



**thermodent®** est une gamme de produits spécifiques pour thermo-désinfecteurs dentaires, développée en partenariat avec **Miele Professional**.

Une solution rapide et économique grâce à la possibilité de dosage automatique des produits.

### thermodent® alka clean - DM classe I



Nettoyant liquide alcalin

#### Les + schülke

- Excellente matéro-compatibilité
- Excellente performance de nettoyage
- Préserve les instruments
- Activité renforcée si l'on utilise de l'eau déminéralisée et thermodent® clear lors du rinçage final

#### Conditionnement

5 l (unité)

#### Référence

147 305

- **Composition** : agents tensioactifs, agents anticorrosion, enzymes, polycarboxylates, solubilisateur

### thermodent® powder - DM classe I



Nettoyant en poudre alcalin

#### Les + schülke

- Très bonnes performances de nettoyage
- Ne pas utiliser pour les pièces à mains et contre-angles
- Bonne solubilité, ne contient pas de silicate
- Economique : 30 g par cycle (soit 200 cycles)

#### Conditionnement

Seau de 6 kg (unité)

#### Référence

143 406

- **Composition** : phosphates, agents tensioactifs non-ioniques, carbonates, agents anticorrosion

### thermodent® neutralizer - DM classe I



Neutralisant liquide acide

#### Les + schülke

- Préviens la formation de dépôts, à utiliser après un nettoyage alcalin
- Sans phosphates, à base d'acide citrique
- Economique : 10 ml par cycle (soit 500 cycles)

#### Conditionnement

5 l (unité)

#### Référence

143 305

- **Composition** : acide citrique

### thermodent® clear - DM classe I



solution de rinçage

#### Les + schülke

- Garantit un séchage rapide et sans tâches, évite la formation de résidus
- Economique : 3 ml par cycle (soit 333 cycles)

#### Conditionnement

1 l (10 flacons par carton)

#### Référence

143 101

- **Composition** : agents tensioactifs non-ioniques, agents anticorrosion

Utilisation des produits de la gamme thermodent® : se référer aux recommandations du fabricant du thermo-désinfecteur.

Produits biodégradables (OCDE 301D) / Emballages recyclables.

Marquage CE.

DM fabriqués par Schülke & Mayr GmbH<sup>1</sup>.

Utiliser les DM avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

# Fiches pratiques


## Aide au dosage et bacs

Accessoires	Référence
Robinet pour bidon de 5 l	135 501
Pompe doseuse pour bidon de 5 l (délivre 20 ml par pression)	117 101
Clé pour bidon de 5 l	135 810
Pot doseur 50 ml	136 102
Bac rotasept®	144 030
Bac de trempage 3 l	144 307
Bac de trempage 5 l	144 407
Bac de trempage 10 l	144 507

## Tableau de dilution

Volume de solution	0,5 %	1 %	1,5 %	2 %	3 %	4 %	5 %	10 %
1 litre	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml	100 ml
2 litres	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml	80 ml	100 ml	200 ml
3 litres	15 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	120 ml	150 ml	300 ml
4 litres	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml	200 ml	400 ml
5 litres	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml	500 ml
10 litres	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	400 ml	500 ml	1000 ml

## Protocole de désinfection et de stérilisation des instruments

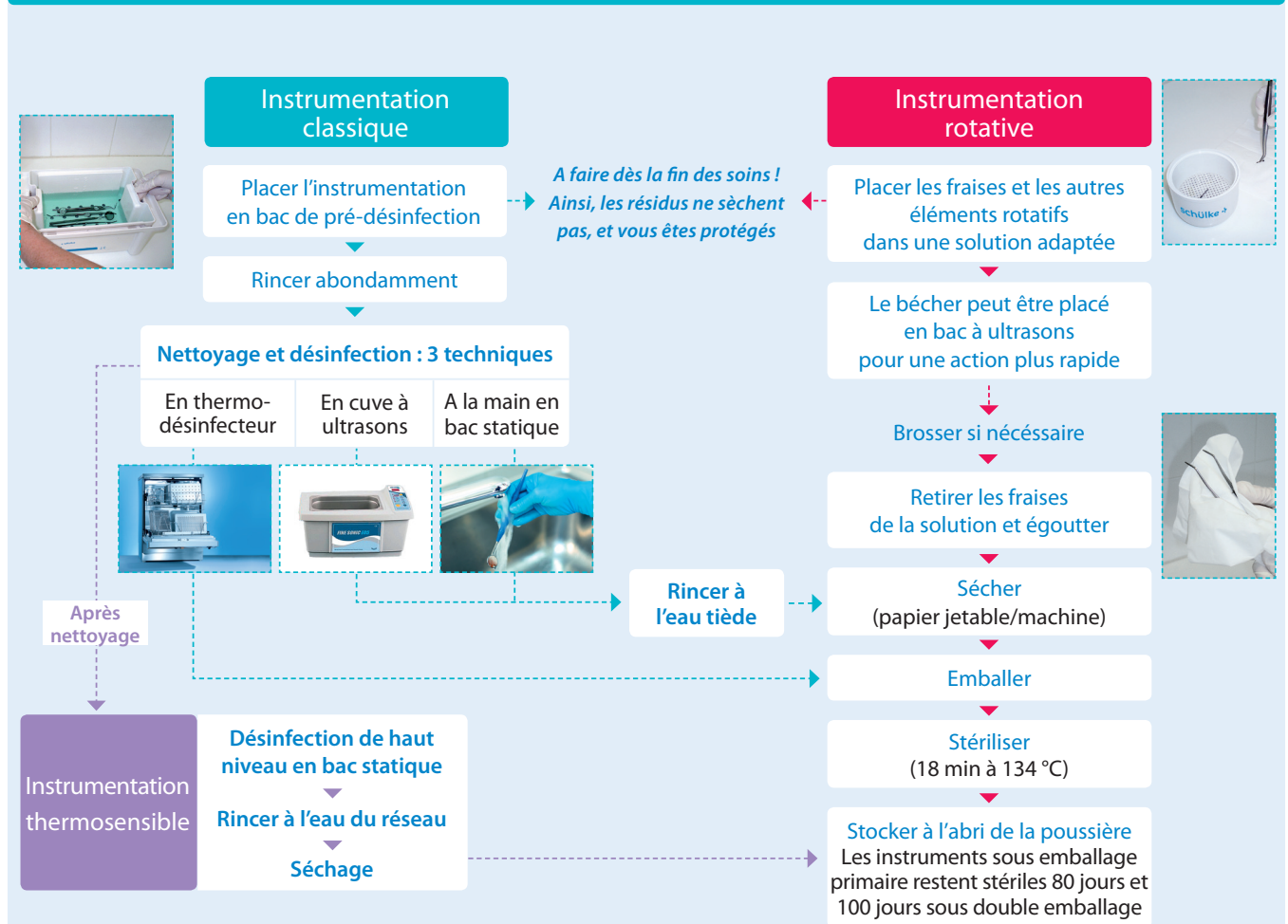

Selon les recommandations de la SF2H\* et du Ministère de la Santé

\* Société Française d'Hygiène Hospitalière





# Nettoyage et désinfection des surfaces

schülke : des surfaces propres pour un travail propre

Les produits d'hygiène schülke ont été développés spécifiquement pour une utilisation en cabinet dentaire, en tenant compte des risques particuliers liés à la pratique odontologique.



Avec de larges spectres d'efficacité microbologique et des temps d'action et de séchage très courts, la gamme «Surface» schülke est la solution idéale pour nettoyer et désinfecter la salle de soins entre deux patients.

Nos laboratoires ont également développé une gamme spécifique pour les surfaces sensibles telles que le skaï ou le PVC. Liquides, mousses, sprays, lingettes : [schülke a la solution](#).

# Nettoyage et désinfection des surfaces

## Produits avec alcool

### septinol® SA - DM classe IIa

Spray nettoyant et désinfectant pour les surfaces de travail et les dispositifs médicaux

#### Les + schülke

- Très large spectre d'activité
- Sèche vite, pas besoin d'essuyer
- Ne laisse pas de traces

#### Activité microbiologique

**Bactéricide** : EN 1040:1997, EN 13727+A1:2013, EN 14561:2006, EN 16615:2015

**Fongicide** : EN 1275:1997, EN 13624:2013 *C. albicans*, EN 14562:2006, EN 16615:2015

**Virucide** : HBV, HIV, HCV, Adénovirus, Rotavirus, Virus de la Vaccine, Polyomavirus SV40, Norovirus murin, Calicivirus félin

#### Conditionnement

1 l (10 flacons par carton)

5 l (unité)

#### Référence

109 106

109 107

- **Composition** : éthanol, 1-propanol

**Utilisation** : pulvériser sur la surface, essuyer avec un papier à usage unique. Pulvériser une deuxième fois pour désinfecter et laisser sécher.



150 lingettes / 15x18 cm

### mikroqid® AF lingettes - DM classe IIa

Lingettes nettoyantes et désinfectantes pour les surfaces de travail et les dispositifs médicaux

#### Les + schülke

- Produit d'imprégnation : septinol® SA
- Disponibles en **boîtes et recharges** de 150 lingettes et en **sachet souple** de 50 lingettes qualité « premium »
- Très bien imprégnées : permettent une excellente couverture des surfaces
- Très résistantes : pas de déchirures ni de tortillons
- Ne laissent pas de traces

#### Activité microbiologique

**Bactéricide, fongicide, virucide** : voir septinol® SA

#### Conditionnement

Boîte de 150 lingettes (10 boîtes par carton)

Recharge de 150 lingettes (20 recharges par carton)

Sachet souple de 50 lingettes (12 paquets par carton)

#### Référence

109 203

109 204

70000808

- **Composition** : éthanol, 1-propanol

**Utilisation** : nettoyer la surface avec une première lingette. Bien couvrir toute la surface. Désinfecter avec une deuxième lingette. Laisser évaporer le produit sans l'essuyer.



NOUVEAU  
50 lingettes / 20 x 20 cm

### mikroqid® universal liquid et wipes - DM classe IIa

Solution et **GRANDES** lingettes de nettoyage et de désinfection imprégnées d'une solution à faible teneur en alcool

#### Les + schülke

- Excellente matériocompatibilité
- Action rapide
- Efficace en 1 minute selon la norme EN 16615 (Essai à 4 zones)
- Sans colorant ni parfum
- Testé dermatologiquement
- Boîtes de **100 grandes lingettes (20x20 cm)**, résistantes et bien imprégnées

#### Activité microbiologique

**Bactéricide** : EN 13727+A1:2013, EN 16615:2015

**Fongicide** : EN 13624:2013 *C. albicans*, EN 16615:2015

**Mycobactéricide** : EN14348:2005

**Virucide** : HBV, HIV, HCV, Adénovirus, Rotavirus, Polyomavirus SV40, Norovirus murin



#### Conditionnement

Flacon de 1 l pompe montée (10 flacons par carton)

Bidon de 5 l (unité)

Sachet souple de 100 lingettes (6 sachets par carton)

#### Référence

70000998

70000997

70000038

- **Composition** : éthanol, 1-propanol

**Utilisation mikroqid® universal wipes** : nettoyer la surface à traiter. Laisser agir puis laisser sécher sans essuyer. Utiliser une seconde lingette en suivant le même protocole.

**Utilisation mikroqid® universal liquid** : pulvériser à environ 30 cm et laisser sécher.



Nouveau

## Produits sans alcool

### mikroqid® sensitive liquid et wipes - DM classe IIa

Solution et **GRANDES** lingettes sans alcool pour toutes les surfaces et les dispositifs médicaux

#### Les + schülke

- Idéal pour le fauteuil, les matières synthétiques et plastiques
- Ne contient pas d'alcool : ne jaunit pas, ne dessèche pas les surfaces sensibles
- La solution s'utilise au choix avec un pulvérisateur ou un spray mousse
- Boîtes de **200 grandes lingettes (20x20 cm)**, résistantes et bien imprégnées

#### Activité microbiologique

**Bactéricide** : EN 1040:1997, EN 13727+A1:2013, EN 13697:2001, EN 14561:2006, EN 16615:2015

**Fongicide** : EN 1275:1997 *C. albicans*, EN 13624:2013 *C. albicans*, EN 14562:2006, EN 16615:2015

**Virucide** : HBV, HIV, HCV, Rotavirus, Virus de la Vaccine, Polyomavirus SV40, Norovirus murin

#### Conditionnement

Flacon de 1 l (10 flacons par carton)

Boîte de 200 lingettes (10 boîtes par carton)

Sachet souple de 50 lingettes (12 sachets par carton)

#### Référence

165 715

109 184

70000806

- **Composition** : ammoniums quaternaires

**Utilisation mikroqid® sensitive wipes** : nettoyer la surface avec une première lingette. Bien couvrir toute la surface. Désinfecter avec une deuxième lingette. Laisser évaporer le produit sans l'essuyer.

**Utilisation mikroqid® sensitive liquid** : pulvériser, laisser agir 5 min. Si besoin, essuyer le surplus avec un papier.



NOUVEAU  
50 lingettes / 20 x 20 cm

Produits biodégradables (OCDE 301D) / Emballages recyclables.

Marquage CE DQS 0297

DM fabriqués par Schülke & Mayr GmbH<sup>1</sup>.

Utiliser les DM et les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



# Nettoyage et désinfection des surfaces

## Produit spécial sols

### terratin® protect - DM classe IIa

Concentré liquide nettoyant et désinfectant pour sols, dispositifs médicaux et tous types de surfaces



#### Les + schülke

- Excellente performance de nettoyage
- Odeur agréable, fraîche et discrète
- Concentration préconisée : 2 % en 15 min, bien rincer à l'eau claire

#### Activité microbiologique

**Bactéricide :** EN 1040:1997, EN 13727+A1:2013, EN 13697:2001, EN 16615:2015

**Fongicide :** EN 1275:1997, EN 13624:2013 *C. albicans*, EN 13697:2001, EN 16615:2015

**Virucide :** HBV, Adénovirus, Virus de la Vaccine, Rotavirus, Polyomavirus SV40, Calicivirus félin

#### Conditionnement

2 l (5 flacons par carton)

5 l (unité)

#### Référence

181 604

181 612

- **Composition :** chlorure de benzalkonium, phénoxyéthanol, tensioactifs non ioniques

**Utilisation :** diluer le produit, passer la solution sur les sols à l'aide d'un balai plat avec bandeau de lavage. Avec de l'eau propre, rincer les sols et essorer régulièrement le bandeau. Changer l'eau de rinçage si besoin. Pour la désinfection, laisser agir 15 min, puis rincer à l'eau claire selon la même technique.  
Ne pas mélanger avec d'autres produits.

## Protocole de désinfection des surfaces


### Quelques conseils

#### Pour optimiser l'hygiène et la désinfection dans votre salle de soins :

- + Choisir des **revêtements lisses** pour les sols, fauteuils, plans de travail, éviter les angles vifs
- + Dégager les **plans de travail**
- + Eloigner **l'ordinateur de l'unité**
- + Utiliser **des protections à usage unique**

#### Pour limiter les risques de contamination via les surfaces, utiliser de préférence :

- + Une aspiration chirurgicale sans crachoir
- + Des plateaux pour présenter ou déposer les instruments
- + Vérifier que la ventilation est suffisante

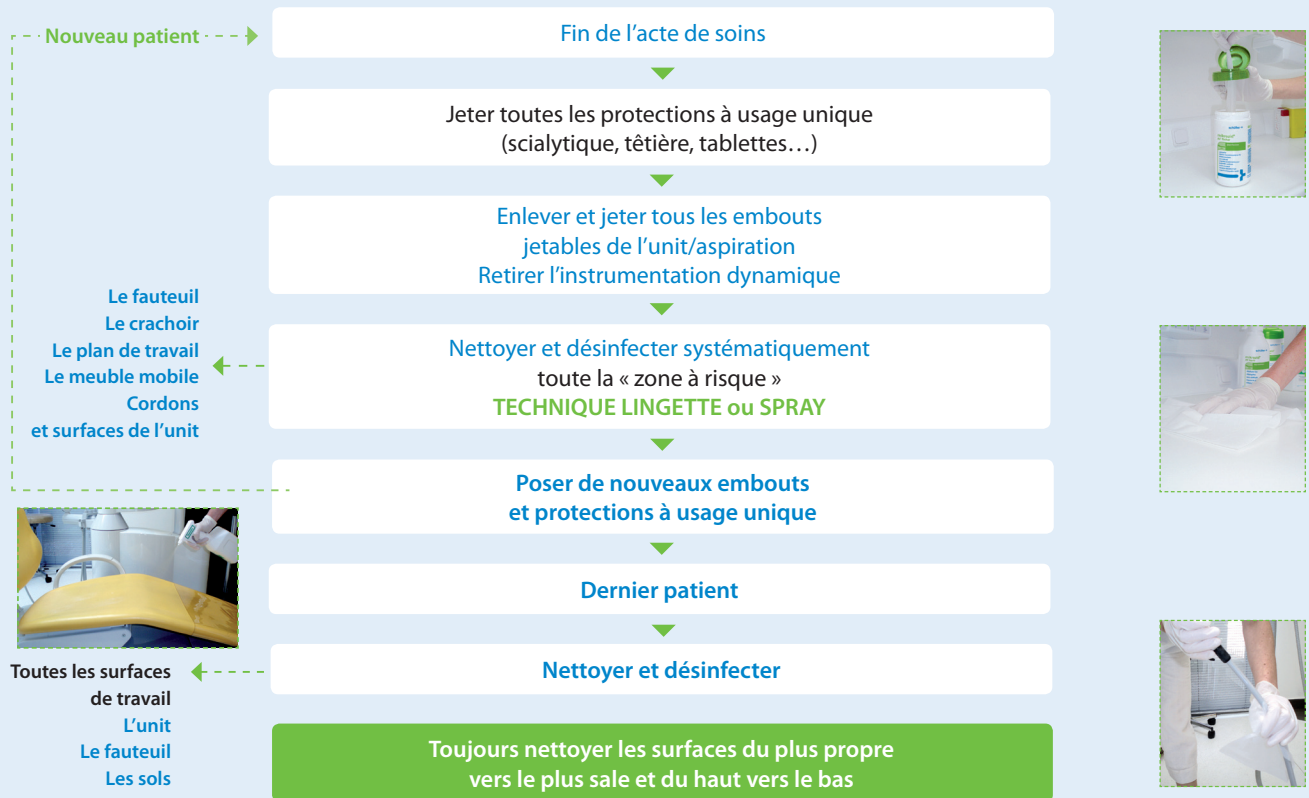

Produits biodégradables (OCDE 301D) / Emballages recyclables.

Marquage CE DQS 0297

DM fabriqués par Schülke & Mayr GmbH<sup>1</sup>.

Utiliser les DM et les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



# Nettoyage et désinfection du système d'aspiration

Le nettoyage et la désinfection du système d'aspiration sont des étapes essentielles des procédures d'hygiène en cabinet dentaire.



L'entretien doit idéalement être réalisé deux fois par jour pour éviter la création de biofilm et la prolifération des micro-organismes dans le système d'aspiration.

Notre gamme a été testée avec succès et validée par les principaux fabricants d'unités dentaires (Kavo, Sirona...) et par de nombreux services techniques pour les systèmes d'aspiration, crachoirs et récupérateurs d'amalgames.



Vidéo disponible

## aspirmatic® - DM classe IIa

Solution concentrée pour le nettoyage quotidien et la désinfection du système d'aspiration et du crachoir



### Les + schülke

- Excellentes performances de nettoyage et de matérieo-compatibilité
- Odeur très agréable
- Produit 2 en 1 : système d'aspiration + crachoir
- Bidon 5 l + pompe = 2 pressions et le produit est dosé !
- Manipulation réduite donc moins de risques d'accident

### Activité microbiologique

**Bactéricide :** EN 1040:1997, EN 13727+A1:2013, EN 14561:2006

**Fongicide :** EN 1275:1997 *C. albicans*, EN 13624:2013, EN 14562:2006

**Virucide :** HIV, HBV, HCV, Virus de la Vaccine

### Conditionnement

2 l (5 flacons par carton)

5 l (unité)

### Référence

150 108

150 110

- **Composition :** ammonium quaternaire, tensioactifs non ioniques, régulateur de pH, régulateur de mousse

**Utilisation :** diluer à 2 %, laisser agir 30 min. A utiliser 1 à 2 fois par jour et après chaque intervention sanglante.

## aspirmatic® cleaner - DM classe I

Solution concentrée pour le nettoyage hebdomadaire du système d'aspiration



### Les + schülke

- Puissant détergent / destruction du biofilm
- Intervention du technicien réduite
- Pas d'odeur nauséabonde

### Conditionnement

2 l (5 flacons par carton)

### Référence

150 303

- **Composition :** acides organiques, tensioactifs non ioniques, inhibiteurs de corrosion

**Utilisation :** diluer à 5 %, laisser agir 1 heure minimum. A utiliser une fois par semaine.

## pot doseur aspirmatic® system

Permet de mélanger et d'évacuer facilement les solutions aspirmatic® et aspirmatic® cleaner



### Les + schülke

- Tuyaux d'aspiration faciles à brancher
- Socle en caoutchouc : le pot reste stable pendant l'aspiration

### Conditionnement

Pot doseur 2000 ml (unité)

### Référence

183 701

Produits biodégradables (OCDE 301D) / Emballages recyclables.

Marquage CE DQS 0297

DM fabriqués par Schülke & Mayr GmbH<sup>1</sup>.

Utiliser les DM avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



# Traitement des empreintes et des prothèses



## Le cabinet dentaire :

- est responsable de la désinfection des empreintes et prothèses avant envoi au laboratoire
- doit informer le laboratoire de la bonne réalisation de cette procédure\*

Etant donné les risques et le nombre d'intervenants, la mise en place d'un protocole commun entre le cabinet et le laboratoire est sans aucun doute la meilleure solution pour limiter les risques d'infections croisées.

\* Conformément aux recommandations du « Guide de prévention des infections liées aux soins en chirurgie dentaire et en stomatologie », Deuxième édition, Ministère de la santé, DGS, juillet 2006

## dentavon® - DM classe IIa

Nettoyant et désinfectant en poudre pour les empreintes et les prothèses dentaires



### Les + schülke

- Excellente matérieo-compatibilité (ex : empreintes en silicone, polyéther, alginate)
- N'altère pas la stabilité dimensionnelle des matériaux
- Bonne dissolution dans l'eau
- Efficace en 5 min seulement

### Activité microbiologique

**Bactéricide** : EN 1040:1997, EN 13727+A1:2013

**Fongicide** : EN 1275:1997 *C. albicans*, EN 13624:2013 *C. albicans*

**Virucide** : EN 14476:2013

### Conditionnement

Pot de 900 g (4 pots par carton)

### Référence

125 203

- **Composition** : eroxomonosulfate de potassium, benzoate de sodium, acide tartrique

**Utilisation** : diluer le produit, immerger 5 min, rincer. Solution stable une journée.

## Protocole de désinfection des empreintes et des prothèses

Retirer l'empreinte de la bouche

Rincer à l'eau du robinet

Vérification visuelle

Visuellement propre

Plonger 5 min dans la solution

Rincer à l'eau claire

Poser un autocollant « désinfecté »

Souillures visibles

Envoi au laboratoire



Produits biodégradables (OCDE 301D) / Emballages recyclables.

Marquage CE DQS 0297

DM fabriqués par Schülke & Mayr GmbH<sup>1</sup>.

Utiliser les DM avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



# Accessoires

## Distributeurs et supports muraux

	<b>Distributeur SM2</b> Pour flacons 1 l <span style="float: right;">668 500</span> <i>Délivre 1, 2 ou 3 ml par pression selon le réglage</i>		<b>Supports muraux PVC</b> Pour flacons 1 l <span style="float: right;">134 416</span> Pour flacons 500 ml pompe montée <span style="float: right;">134 425</span>
	<b>Distributeur mural à commande au coude pour flacons airless 1 l</b> Distributeur bras court <span style="float: right;">134 426</span> Distributeur bras long <span style="float: right;">134 427</span> <i>Délivre 1,5 ml par pression</i>		<b>Distributeur D1 touchless</b> Pour flacons airless 1 l <span style="float: right;">668 315</span> <i>Délivre 1,5 ml par passage main</i> Stop-gouttes inclus

Et bientôt disponibles, les supports muraux pour flacons hyclick.

## Bacs de trempage

Caractéristiques :

- En PVC blanc
- Avec panier amovible
- Compatible avec les préparations désinfectantes

	<b>Bac à fraises rotasept®</b> Contenance: 250 ml Dimensions int. : Ø 81 x 54 mm Dimensions ext. : Ø 85 x 60 mm <b>Référence</b> <span style="float: right;">144 030</span>		<b>Bac 5 litres</b> Dimensions int. : 500 x 170 x 120 mm Dimensions ext. : 555 x 205 x 135 mm <b>Référence</b> <span style="float: right;">144 407</span>
	<b>Bac 3 litres</b> Dimensions int. : 250 x 150 x 120 mm Dimensions ext. : 300 x 185 x 125 mm <b>Référence</b> <span style="float: right;">144 307</span>		<b>Bac 10 litres</b> Dimensions int. : 340 x 260 x 170 mm Dimensions ext. : 400 x 300 x 180 mm <b>Référence</b> <span style="float: right;">144 507</span>

## Accessoires de dosage

	<b>Pompe</b> Pour flacons 1 l <span style="float: right;">180 303</span> <i>délivre 3 ml par pression</i>		<b>Pompe</b> Pour bidons 5l <span style="float: right;">117 101</span> <i>délivre 20 ml / pression</i>
	<b>Pulvérisateur standard</b> Pour flacons 1 l <span style="float: right;">180 124</span> <i>A utiliser avec septinol® SA</i>		<b>Clé</b> Pour bidons 5 l <span style="float: right;">135 810</span>
	<b>Pulvérisateur mousse</b> Pour flacons 1 l <span style="float: right;">180 123</span> <i>A utiliser avec esemfix® et mikrozyd® sensitive liquid</i>		<b>Robinet</b> Pour bidons 5 l <span style="float: right;">135 501</span>
	<b>Pot doseur aspirmatic®</b> Pot de 2 l <span style="float: right;">183 701</span>		<b>Doseur</b> Pot doseur 50 ml <span style="float: right;">136 102</span>



# Documentation disponible

## Protocoles d'utilisation

**schülke -+**

### Protocole d'utilisation aspirmatic® [DM IIa] & aspirmatic® cleaner [DM I]



Pour une utilisation optimale, pensez au pot doseur aspirmatic system et à la pompe SL (délivre 20ml par pression !)

<b>aspirmatic®</b>	<b>aspirmatic® cleaner</b>
Verser d'abord l'eau dans le pot doseur aspirmatic® jusqu'au niveau 1900 ml.	Verser d'abord l'eau dans le pot doseur aspirmatic® jusqu'au niveau 1900 ml.

Gamme complète pour l'entretien et la désinfection des systèmes d'aspiration, crachoirs, flexibles et séparateurs d'aspiration.


- aspirmatic®
  - Efficaces
  - Excellente tolérance
  - Odeur agréable
  - Non résiduel
  - Produit à 2 en 1
- Recommandé
  - Dilution 1:2
  - 1 à 2 fois par semaine

**schülke -+**

### Traitement de l'instrumentation

Qualité. Sécurité. Schülke.

#### Protocole de désinfection - stérilisation des instruments

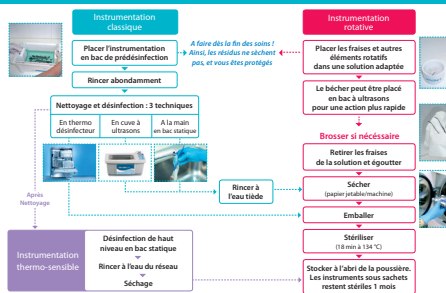

**Instrumentation classique**

- Placer l'instrumentation en bac de pré-désinfection
- Rincer abondamment
- Nettoyage et désinfection : 3 techniques
  - En thermo désinfecteur
  - En cuve à ultrasons
  - A la main
- Rincer à l'eau tiède
- Désinfection de haut niveau en bac statique
- Rincer à l'eau du réseau
- Séchage

**Instrumentation rotative**

- Placer les fraises et autres éléments rotatifs dans une solution adaptée
- Le bécrot peut être placé en bac à ultrasons pour une action plus rapide
- Brosser si nécessaire
- Retirer les fraises de la solution et égoutter
- Sécher (sécher par ultrasons)
- Emballer
- Stériliser (18 min à 134 °C)
- Stocker à l'abri de la poussière. Les instruments sous sachets restent stériles 1 mois.

**Instrumentation thermo-sensible**

- Désinfection de haut niveau en bac statique
- Rincer à l'eau du réseau
- Séchage

**Gamma professionnelle INSTRUMENTS**

- aspirmatic®**
  - Solution concentrée pour le nettoyage et la désinfection de l'instrumentation
  - Ravive la brillance des instruments
- desderman®**
  - Solution prête à l'emploi pour le nettoyage et la désinfection des instruments rotatifs
  - Anticorrosion
- desderman®**
  - Désinfectant et désinfectant pour l'instrumentation générale
  - Poudre tri-enzymatique
  - Nouvelle formule, se dissout plus facilement
- desderman®**
  - Solution nettoyante désinfectante à froid des instruments chirurgicaux et thermosensibles
  - Bonne matière-compatibilité
  - Sans formaldéhyde
  - Large spectre d'activité

## Fiches produits

Information produit Désinfection des mains

**schülke -+**

### desderman® pu



Les avantages du produit

- Testé en accord avec les normes européennes
- Actif sur norovirus en 15 secondes, sur les bactéries et sur adénovirus en 2 minutes
- Sans parfum, ni colorant, hypoallergénique
- Sèche vite et ne colle pas
- Bonne tolérance cutanée, préserve la présence d'émollients

Domaines d'application

Traitement hygiénique des mains par friction et désinfection chirurgicale des mains par friction.

Conseils d'utilisation

Les gels hydro-alcooliques sont à la fois très peu d'efficacité et extrêmement efficaces. Les produits sont par ailleurs moins agressifs pour la peau d'eau et de savon.

desderman® pure gel s'utilise non dilué et doit progressivement pour que les mains restent le pendant toute la durée d'application recommandée appliqué sur mains propres et sèches. En cas de séchage préférez de laver les mains au savon et de d'appliquer desderman® pure gel.

Traitement hygiénique des mains par friction : 3 ml de desderman® pure gel pour un temps de 2 x 45 secondes.

Désinfection chirurgicale des mains par friction : 2 à 3 ml de desderman® pure gel pour un temps de 2 x 45 secondes.

Recommandations

- Tenir hors de la portée des enfants.
- À usage externe uniquement.
- Ne pas avaler.
- Ne pas mettre dans les yeux.
- Conserver à l'écart de toute source d'ignition.
- Ne plus utiliser après la date de péremption.

**schülke -+**

### mikrozid® universal liquid

Flacon de 1 l spray moussant

Désinfectant rapide à faible teneur en alcool pour toutes les surfaces et les dispositifs médicaux

Les avantages du produit

- Bonne compatibilité avec tous types de matériaux (par exemple et autres supports numériques)
- Action rapide
- Efficace en 1 minute en vertu de la norme EN 16185 (Etat 3-4 zones)
- Sans colorant ni parfum
- Performance de nettoyage exceptionnel
- Testé dermatologiquement
- Prêt à l'emploi

Domaines d'application

Désinfection rapide à base d'alcool des équipements médicaux et de toutes sortes de surfaces multimatériaux, présentant un risque d'infection et où des temps de contact courts à très courts sont nécessaires respectueux des matériaux sensibles, tels que :

- Les surfaces à proximité des patients
- Les tables d'examen et des patients
- Les tables d'examen
- Les surfaces des équipements et instruments médicaux
- Les surfaces des équipements de communication sensibles, tels que des smartphones ou tablettes

Efficacité	Concentration	Temps de contact
Aspirmatic® DM 3727 + condition de surface	prêt à l'emploi	15 s
desderman® DM 1420 + condition de surface	prêt à l'emploi	5 min
desderman® DM 1420 + condition de surface	prêt à l'emploi	1 min
desderman® DM 1420 + condition de surface	prêt à l'emploi	2 min
desderman® DM 1420 + condition de surface	prêt à l'emploi	15 min
desderman® DM 1420 + condition de surface	prêt à l'emploi	30 s
desderman® DM 1420 + condition de surface	prêt à l'emploi	90 s
desderman® DM 1420 + condition de surface	prêt à l'emploi	15 s
desderman® DM 1420 + condition de surface	prêt à l'emploi	15 s
desderman® DM 1420 + condition de surface	prêt à l'emploi	15 s

CE 0257

## Book hygiène

**schülke -+**

### Cabinet engagé, patient en sécurité

Mon guide de l'hygiène au cabinet dentaire

Nouvelle édition



## Dossiers techniques (incluant rapports de tests complets)

**schülke -+**

Une entreprise du groupe Air Liquide

### Dossier technique produit mikrozid® universal wipes



V1.1 - dernière mise à jour : février 2017

the plus of pain performance

Ces documents sont disponibles sur simple demande à l'adresse suivante : [schuelkefrance.info@schuelke.com](mailto:schuelkefrance.info@schuelke.com)

# Un programme dédié aux assistantes dentaires

Le programme schülke « Touche pas à mon Assistante ! »



Infections croisées, accident d'exposition au sang et aux liquides biologiques, manipulation de produits irritants...

## schülke vous aide à prendre soin de vous !

### La tenue de travail

Portez une tenue de travail **adaptée à votre activité.**

Privilégiez les matières pouvant être lavées à 65°C. Pour des raisons d'hygiène, les tenues doivent être **lavées au cabinet dentaire.**



### Les vaccins

Hépatite B, diphtérie, tétanos, poliomyélite, BCG.

**Êtes-vous à jour ?**



### Les mains

**Votre outil de travail le plus précieux !**

Lavez-vous les mains et désinfectez-les avec un **produit hydro-alcoolique systématiquement** entre deux patients en respectant le **protocole en 7 étapes.**

En fin de journée, appliquez de la **crème hydratante.** Une peau saine, bien hydratée est une excellente barrière contre les micro-organismes !

### Les gants

• Lorsque vous faites des **soins aux patients.** Enlevez-les **immédiatement** après la fin du soin pour ne pas contaminer d'autres surfaces.

• Lorsque vous êtes en **contact avec des désinfectants** (dilution des produits concentrés, nettoyage et désinfection des instruments, des surfaces, des empreintes, de l'unit dentaire...)



### En cas d'accident

Affichez en salle de stérilisation le **protocole à suivre en cas de coupure ou de piqûre** avec un objet souillé et inscrivez le n° de téléphone du centre à contacter.



### Le visage

Portez des **lunettes de protection larges** ou **des visières** lors des soins. Désinfectez-les, voire même stérilisez-les, régulièrement.

Portez un **masque couvrant le nez et la bouche.** Changez-les entre chaque patient et parfois durant le soin pour les traitements longs : un masque humide n'est plus une barrière efficace contre les micro-organismes !

# Formations

## Notre expertise à votre service

Pour aller plus loin dans la qualité de service auprès de ses clients, schülke propose des produits sûrs et efficaces, mais également une offre globale de prestations de services.



- Formation sur les risques d'infections croisées au cabinet dentaire
- Audit et diagnostic des pratiques d'hygiène
- Aide à la décision pour la mise en place des bonnes pratiques et formation du personnel

schülke est enregistré en tant qu'organisme de formation sous le n° 11 75 39851 75 auprès de la Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle d'Ile de France.

Pour toute demande d'informations sur nos services et nos formations : [schuelkefrance.info@schuelke.com](mailto:schuelkefrance.info@schuelke.com)



Pour toute demande de protocole, fiche information produit ou dossier technique : [schuelkefrance.info@schuelke.com](mailto:schuelkefrance.info@schuelke.com)

schülke est partenaire de la CNQAOS

Nous mettons notre expertise en hygiène au service des assistantes dentaires en formation





# Il y a toujours un interlocuteur schülke à votre écoute

Nos représentants dans vos régions :

## SECTEUR PARIS IDF

Olivier Rahimi  
Tél. : 06.12.34.29.34  
olivier.rahimi@schuelke.com  
Dpt : 28, 45, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

## SECTEUR OUEST

Sophie Bastard  
Tél. : 06.28.67.56.36  
sophie.bastard@schuelke.com  
Dpt : 18, 22, 29, 35, 36, 37, 41, 44, 49, 53, 56,  
72, 85

## SECTEUR SUD-OUEST

Hélène Rousseau  
Tél. : 06.21.74.33.21  
helene.rousseau@schuelke.com  
Dpt : 09, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 40,  
46, 47, 64, 65, 79, 81, 82, 86, 87

## SECTEUR NORD

Alexander Baumert  
Tél. : 06.11.16.03.94  
alexander.baumert@schuelke.com  
Dpt: 02, 14, 27, 50, 62, 59, 60, 61, 76, 80

## MARKETING

Hélène Lagorce  
Responsable Marketing Hygiène Médicale  
Tél. : 01.42.91.42.74  
helene.lagorce@schuelke.com

Adèle Marais  
Chef de Marché Dentaire  
Tél. : 01.42.91.42.76  
adele.marais@schuelke.com

## SECTEUR SUD-EST

Stéphanie Matthieu  
Tél. : 06.03.51.05.09  
stephanie.matthieu@schuelke.com  
Dpt : 2A, 2B, 04, 05, 06, 11, 13, 30, 34,  
48, 66, 83, 84, 98

## SECTEUR RHÔNE-ALPES

Hervé Garabédian  
Tél. : 06.20.80.05.66  
herve.garabedian@schuelke.com  
Dpt : 01, 03, 07, 15, 21, 26, 38, 42, 43, 58,  
63, 69, 71, 73, 74, 89

## SECTEUR EST

Catherine Thiebaut  
Tél. : 06.03.51.00.69  
catherine.thiebaut@schuelke.com  
Dpt : 08, 10, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 67,  
68, 70, 88, 90



Comme  
**schülke** -+ devenez  
partenaire\* de l'AOI

\*Faites un don en offrant une consultation par mois à l'AOI et devenez Cabinet Partenaire



www.aoi-fr.org



## schülke dans le monde

### Allemagne

Schülke & Mayr GmbH  
22840 Norderstedt  
Téléphone +49-40-521 00-0  
Fax +49-40-521 00-318

### Autriche

Schülke & Mayr Ges.m.b.H.  
1070 Vienne  
Téléphone +43-1-523 25 01-0  
Fax +43-1-523 25 01-60

### Belgique

S.A. Schülke & Mayr  
Belgium N.V.  
1830 Machelen  
Téléphone +32-02-479 73 35  
Fax +32-02-479 99 66

### Chine

Schülke & Mayr GmbH  
Shanghai Representative Office  
Shanghai 200041  
Téléphone +86-21-62 17 29 95  
Fax +86-21-62 17 29 97

### France

Schülke France SARL  
92806 Puteaux Cedex  
Téléphone +33-1-42-91-42-42  
Fax +33-1-42-91-42-88

### Grande-Bretagne

Schülke & Mayr UK Ltd.  
Sheffield S9 1AT  
Téléphone +44-1142-54 35 00  
Fax +44-1142-54 35 01

### Italie

Schülke & Mayr Italia S.r.l.  
20148 Milan  
Téléphone +39-02-40 21 820  
Fax +39-02-40 21 829

### Malaisie

Schülke & Mayr (Asia) Sdn Bhd  
46000 Petaling Jaya  
Selangor  
Téléphone +60-3-77 83 56 98  
Fax +60-3-77 84 79 31

### Pays-Bas

Schülke & Mayr Benelux B.V.  
2003 LM-Haarlem  
Téléphone +31-23-535 26 34  
Fax +31-23-536 79 70

### Pologne

Schülke Polska Sp.z.o.o.  
01-793 Varsovie  
Téléphone +48-22-568 22 02-03  
Fax +48-22-568 22 04

### Singapour

Schülke & Mayr (Asia) Pte. Ltd.  
Singapour 768767  
Téléphone +65-62-57 23 88  
Fax +65-62 57 93 88

### Suisse

Schülke & Mayr AG  
8003 Zurich  
Téléphone +41-44-466 55 44  
Fax +41-44-466 55 33

Pour toute demande d'informations : [schuelkefrance.info@schuelke.com](mailto:schuelkefrance.info@schuelke.com)

Les dispositifs médicaux présents dans cette brochure sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Organisme certificateur : DQS 0297 et 0433

Utiliser les DM et les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et les informations concernant le produit.

Fabricant :

<sup>1</sup> Schülke & Mayr GmbH

Robert-Koch Str 2 | 22851 Norderstedt | Allemagne

Partenaire : MPC international | Luxembourg | Luxembourg

### Schülke France SARL

22 Terrasse Bellini | CS 70027 | 92806 Puteaux Cedex | France

Tél. +33 1 42 91 42 42 | Fax +33 1 42 91 42 88

[schuelkefrance.info@schuelke.com](mailto:schuelkefrance.info@schuelke.com) | [www.schuelke.fr](http://www.schuelke.fr)

Une société du groupe