



**Perfect Bleach® Office+**  
**Perfect Bleach® 10 % / 17 %**

**GEL POUR L'ÉCLAIRCISSEMENT DES DENTS COLORÉES**

# Perfect Bleach®

## GEL POUR L'ÉCLAIRCISSEMENT DES DENTS COLORÉES

L'aspect esthétique des dents est de plus en plus important pour beaucoup de personnes. Les colorations n'ont pas seulement une influence négative sur l'esthétique, mais également sur l'aspect général et suscitent le désir d'un traitement adapté pour éclaircir les dents. L'éclaircissement des dents avec un gel de blanchiment, si on l'utilise de manière adéquate, propose une possibilité non-agressive et efficace pour regagner l'esthétique.

En fonction de votre préférence vous pouvez choisir entre Perfect Bleach Office+, le blanchiment au fauteuil à 35 % de peroxyde d'hydrogène, et Perfect Bleach à 10 % ou à 17 % de peroxyde de carbamide. Si vous optez pour Perfect Bleach Office+ ou Perfect Bleach vous choisissez un système qui correspond à la qualité VOCO habituelle, répondant ainsi aux exigences esthétiques de vous et de vos patients.

### Perfect Bleach® Office+

Perfect Bleach Office+ est un gel à base de peroxyde d'hydrogène pour l'éclaircissement des dents au fauteuil. Lors de l'application pratique de la seringue QuickMix 4:1, la concentration de Perfect Bleach Office+ est de 35% de peroxyde d'hydrogène. En combinaison avec la protection gingivale qui se trouve également dans le coffret et les embouts correspondants, Perfect Bleach Office+ vous permet d'effectuer un traitement sûr et rapide au cabinet.

### Perfect Bleach® (10 % et 17 %)

Perfect Bleach est un matériau pour le blanchiment à base de peroxyde de carbamide. Selon le type de la coloration, vous pouvez choisir une concentration de 10 % ou de 17 %. Le patient peut également utiliser Perfect Bleach lui-même à la maison, selon vos instructions.



# Perfect Bleach® Office+

## 35 % DE PEROXYDE D'HYDROGÈNE

### Des patients et utilisateurs contents

Perfect Bleach Office+ est un gel particulièrement efficace. Grâce à sa concentration de peroxyde d'hydrogène de 35 % des succès d'éclaircissement rapides, sûrs et durables sont réalisés. Le gel ne reste que 10 à 15 minutes sur les dents. Perfect Bleach Office+ a une valeur pH neutre et contient des fluorures de sodium. Ces deux caractéristiques réduisent nettement les sensibilités des patients très sensibles pendant et après le procédé de blanchiment.

L'utilisation de la seringue QuickMix vous garantit une application simple ainsi qu'un gel toujours frais et parfaitement mélangé à chaque application. La seringue QuickMix vous permet également d'activer exactement la quantité de gel nécessaire pour le patient. Soit l'éclaircissement de toute la dentition, soit l'éclaircissement d'une dent séparée – vous travaillez toujours avec la quantité réellement nécessaire de gel de blanchiment. Ainsi, contrairement à d'autres systèmes de blanchiment au fauteuil, il n'y a pas de restes de matériau à jeter lors de l'utilisation de Perfect Bleach Office+.

### Blanchiment endo – Simple, exacte et rapide


Avec Perfect Bleach Office+ l'éclaircissement des colorations intrinsèques est facilité et le travail pour vous et votre équipe est nettement réduit. Le mélange prêt à l'emploi peut être appliqué directement de la seringue dans la cavité préparée. Le coffret Perfect Bleach Office+ contient également des embouts fins spéciaux vous permettant d'appliquer le gel frais précisément de la seringue.

### Temps d'action court sans utilisation d'une lampe

Le temps d'action de Perfect Bleach Office+ est de seulement 10 à 15 minutes. Une fois appliqué sur les dents, le gel ne doit pas encore être activé davantage. Le grand avantage de la renonciation à la lampe, c'est que ni les dents traitées, ni la gencive voisine ne subissent des lésions par la chaleur. Avec Perfect Bleach Office+ des irritations de la pulpe, des brûlures de la gencive et des plus fortes hypersensibilités provoquées par la chaleur d'une lampe sont exclues. D'autre part, en renonçant à l'utilisation d'une lampe chère, le temps du traitement au fauteuil ainsi que l'emploi d'appareils sont réduits. En même temps, le confort pour le patient est nettement augmenté.

### LC Dam – La protection gingivale pratique

Le coffret de Perfect Bleach Office+ contient la protection gingivale LC Dam. La consistance de la protection gingivale à base de composite a été développée en collaboration étroite avec les praticiens. Non seulement le comportement de fluage, mais également les propriétés de l'enlèvement ont été continuellement optimisées et adaptées aux besoins. LC Dam couvre la gencive parfaitement jusque dans les papilles interdentaires, sans couler. Au cours du traitement LC Dam ne glisse pas et peut être enlevé en un seul morceau après le traitement. Il y a également des avantages pour le patient. Contrairement à beaucoup d'autres produits, lors de l'utilisation de LC Dam aucun échauffement désagréable de la protection gingivale ne se produit au cours de la photopolymérisation.

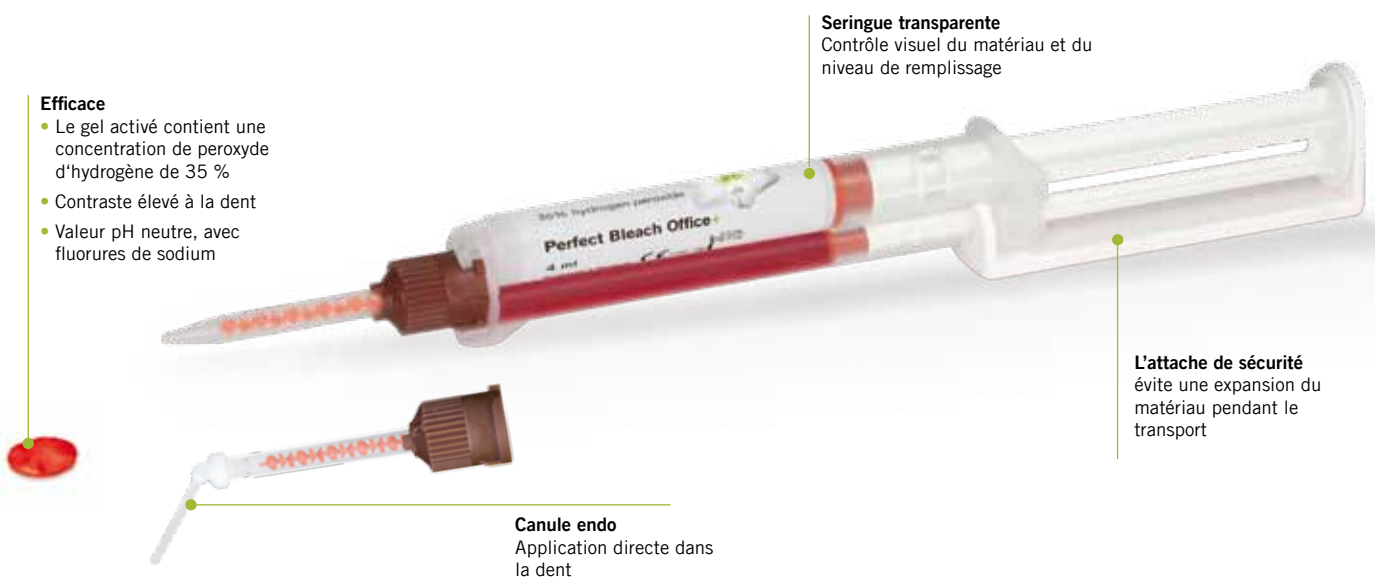

Perfect Bleach® Office+

APPLICATION CLINIQUE

Application de Perfect Bleach® Office+

		
Détermination de la teinte avant le blanchiment	Application de LC Dam	LC Dam durci
		
Application très simple de la seringue QuickMix	Temps d'action de 10 à 15 minutes	Aspirer le gel de blanchiment après le temps d'action
		
Enlèvement du LC Dam ...	... facilement en un seul morceau	Eclaircissement visible après une seule séance (A2)

Application endo de Perfect Bleach® Office+

		
Obturation radiculaire étanche et parfaite de la dent 11	Coloration nettement visible à la dent 11	Chambre pulpaire ouverte avec l'entrée du canal scellé
		
Vue du côté palatal avec la protection gingivale LC Dam appliquée	Application du gel de blanchiment dans la cavité avec l'embout fin joint	Perfect Bleach Office+ dans la chambre pulpaire
		
Rincer et aspirer le gel de blanchiment soigneusement	Scellement étanche de la cavité avec un matériau en verre ionomère	Résultat esthétique

## Perfect Bleach® 10 % / 17 %

### 10 % ET 17 % DE PEROXYDE DE CARBAMIDE

#### Perfect Bleach® – Non-agressif et efficace en même temps

Perfect Bleach est un matériau pour le blanchiment à base de peroxyde de carbamide. Selon votre préférence, vous pouvez proposer à votre patient un traitement avec le gel de peroxyde de carbamide à 10 % ou à 17 %. Le matériau de blanchiment en même temps non-agressif et efficace peut être utilisé au fauteuil ou à la maison, selon les instructions du chirurgien-dentiste.

De nombreuses études confirment que des résultats d'éclaircissement nettement visibles peuvent déjà être réalisés avec des gels de blanchiment à base de peroxyde de carbamide, tout en ménageant les tissus dentaires. La concentration de peroxyde de carbamide de Perfect Bleach est assez élevée pour éliminer les colorations de manière efficace et non-agressive. Perfect Bleach à 17 % contient du potassium et des fluorures de sodium contre les hypersensibilités éventuelles pendant et après le traitement. Dans le cas d'un stockage adéquat, la stabilité élevée du gel de peroxyde de carbamide assure un stockage durable.

#### Vos avantages


L'utilisation du coffret est simple, soit pour le personnel du cabinet, soit pour les patients. La trousse pratique et attrayante peut être remise à vos patients. Elle contient les seringues

avec le peroxyde de carbamide, le mode d'emploi (avec pictogramme), le teintier pour contrôler le résultat du traitement et un étui pour les gouttières. Tous les matériaux nécessaires pour la préparation de la gouttière ont été séparés des ustensiles pour le patient : deux plaques souples thermoformables, le gel Block Out Gel LC ainsi que les modes d'emploi pour le technicien et pour le praticien. Les plaques souples thermoformables pour la préparation des gouttières peuvent être facilement travaillées et parfaitement adaptées. Ensuite, les gouttières finies peuvent être facilement remplies avec le gel de blanchiment.

#### Les avantages pour vos patients

L'utilisation de Perfect Bleach est très simple et facile à effectuer. Le mode d'emploi avec les pictogrammes qui se trouve également dans le coffret aidera en plus le patient. La consistance du gel évite des irritations de la gencive, car il ne coule pas de la gouttière. Un autre avantage est que la gouttière ne doit être portée que peu de temps, il n'est pas nécessaire de la porter pendant toute la nuit. Pendant les premières deux heures après l'insertion de la gouttière, l'effet du gel arrive au maximum. Les premiers résultats visibles d'éclaircissement peuvent déjà être constatés à partir de la deuxième utilisation. Le goût de menthe frais est agréable pour le patient.

#### Perfect Bleach®

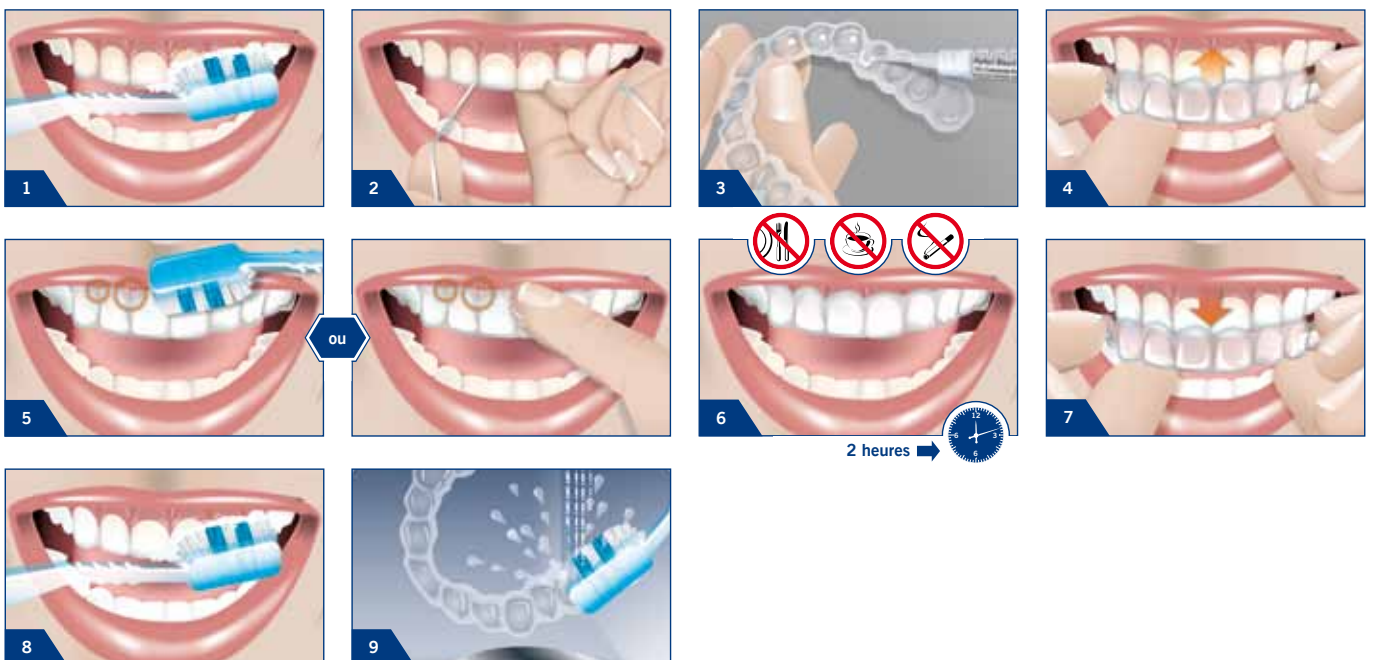

## Perfect Bleach®

### GEL POUR L'ÉCLAIRCISSEMENT DE DENTS COLORÉES

#### Perfect Bleach® Office+

##### Indications

Eclaircissement d'une ou de plusieurs dents colorées, vivantes ou dévitalisées, au fauteuil

##### Avantages

- 35 % de peroxyde d'hydrogène pour un éclaircissement rapide et fiable
- Seringue QuickMix pratique de 4 ml
- Consistance parfaite, application simple, ne coule pas
- Bon contraste à la dent et au LC Dam par la teinte rougeâtre du matériau
- Seule la quantité nécessaire du gel de blanchiment est activée, des plus petites quantités sont également possibles, par ex. pour le blanchiment endo
- Dans le coffret: protection gingivale pratique, à base de composite et des embouts spéciaux pour le blanchiment endo

##### Présentations Perfect Bleach® Office+

- REF 1672 2 x 4 ml seringue QuickMix, 2 x 2 g seringues LC Dam, accessoires
- REF 1673 1 x 4 ml seringue QuickMix, accessoires

#### Perfect Bleach®

##### Indications

Eclaircissement d'une ou de plusieurs dents colorées, vivantes ou dévitalisées, à la maison sous contrôle du chirurgien-dentiste ou au fauteuil

##### Avantages

- Deux concentrations: 10 % ou 17 %
- Utilisation facile et confortable
- Le coffret complet contient tous les matériaux :
  - deux plaques souples thermoformables et le Block Out Gel LC pour la préparation des gouttières individuelles
  - 6 x 2,4 ml gel de blanchiment
  - étui pour les gouttières
  - teintier pour contrôler le résultat du traitement
  - pictogramme et mode d'emploi pour les patients
- Goût agréable de menthe
- La concentration du gel de peroxyde de carbamide reste stable, même si le stockage au frais a été interrompu

##### Présentations Perfect Bleach®

- REF 1660 Coffret complet, 6 x 2,4 ml seringue de gel de blanchiment (10% de peroxyde de carbamide), 2 plaques souples thermoformables, accessoires
- REF 1664 Coffret complet, 6 x 2,4 ml seringue de gel de blanchiment (17% de peroxyde de carbamide), 2 plaques souples thermoformables, accessoires
- REF 1658 Coffret pour le patient, 4 x 2,4 ml seringue de gel de blanchiment (10% de peroxyde de carbamide), accessoires
- REF 1659 Coffret pour le patient, 4 x 2,4 ml seringue de gel de blanchiment (17% de peroxyde de carbamide), accessoires
- REF 1662 3 x 2,4 ml seringue de gel de blanchiment (10% de peroxyde de carbamide)
- REF 1665 3 x 2,4 ml seringue de gel de blanchiment (17% de peroxyde de carbamide)

VOCO GmbH  
Anton-Flettner-Straße 1-3  
27472 Cuxhaven  
Allemagne

Tél.: +49 (0) 4721-719-0  
Fax: +49 (0) 4721-719-140  
info@voco.com  
www.voco.com

Distributeur :