


Ketac™ Cem Plus

3M ESPE


3M France - Marchés de la Santé
Département Dentaire - 3M ESPE
Boulevard de l'Oise 95006 Cergy Pontoise Cedex
Tel.: 01 30 31 82 32 - www.3MESPE.fr

Centre Information Clients
N° Azur 0 810 331 300
www.3m.com/fr


Ciment de scellement verre-ionomère modifié par adjonction de résine, distribué en Clicker™.

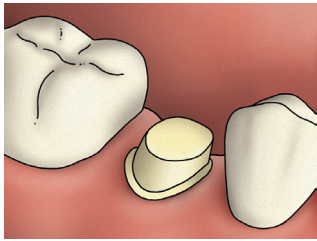


1- Déposer la prothèse provisoire et éliminer le ciment provisoire.

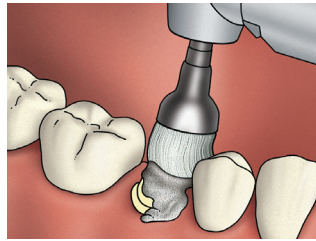

2- Nettoyer la préparation avec une pâte ne contenant pas d'huile.

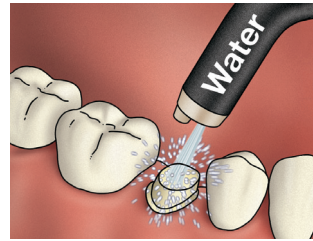


3- Rincer.

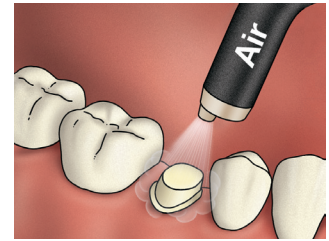


4- Sécher légèrement la préparation dentaire. NE PAS DESHYDRATER.

Distribution et mélange


Note : Pour éviter l'évaporation de l'eau contenue dans le matériau et la déshydratation des pâtes, ne distribuer le matériau qu'au moment de son utilisation et mélanger immédiatement le ciment pour son usage.

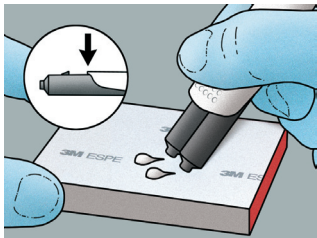


5- Ôter le capuchon du Clicker ; presser sur le levier ; distribuer le matériau.

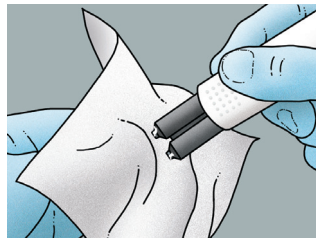

6- Pour obtenir les meilleurs résultats avec le Clicker, garder les embouts propres.

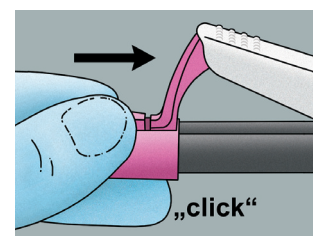


7- Remettre correctement le capuchon.

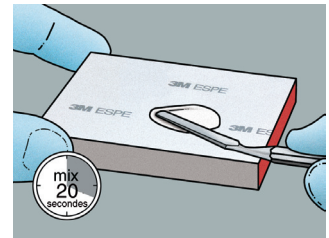


8- Mélanger : temps de mélange de 20 secondes depuis la distribution.

Mise en place du ciment

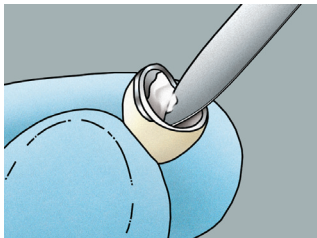

9- Appliquer une fine couche de ciment dans l'intrados prothétique.

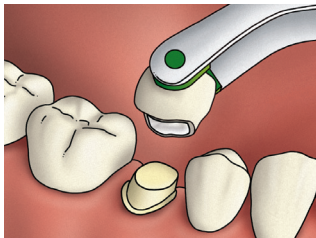

10- Le temps de travail est de 2 minutes 30 secondes depuis la distribution.

Indications


Ciment de scellement sur dents pulpées et déulpées pour :

- des inlays, onlays, couronnes métalliques
- des couronnes et bridges céramo-métalliques
- des prothèses en zircone ou en alumine renforcée
- des tenons radiculaires
- des dispositifs orthodontiques.




Caractéristiques	Avantages	Bénéfices
Clicker™ double seringue	Utilisation rapide et hygiénique	Confort d'utilisation
	Ratio parfait, quantité exacte nécessaire délivrée	Système prêt à l'emploi
	80 doses	Propriétés reproductibles du matériau
	Lecture du niveau de consommation du Clicker	Plus de fiabilité
Version pâte / pâte	Facile à mélanger	40 à 60 scellements
	Dosage parfait	Economique car toujours adapté à la taille de restauration
		Gestion des stocks
		Gain de temps
		Grande simplicité et économie


Mise en place de la restauration

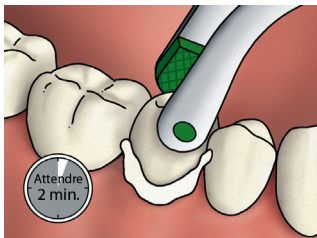


11- Mettre en place la restauration définitive avec une légère pression.

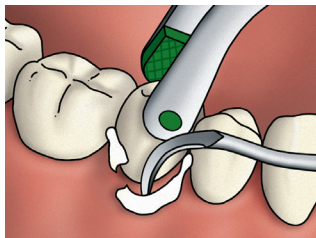

12- Éliminer les excès après 2 minutes de mise en bouche, avec un instrument approprié.

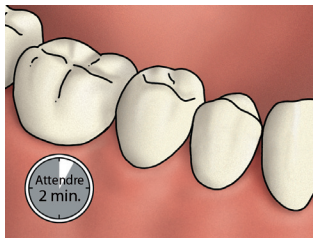

13- Le temps de prise est de 5 minutes après la mise en bouche.

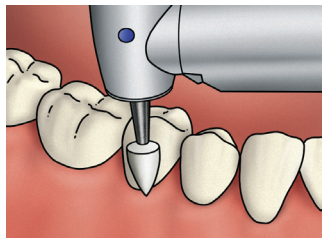

14- Finir le contrôle de la restauration et ajuster l'occlusion si nécessaire.