

# PHOENIX MD

Résine pour bridges & couronnes provisoires  
Formulation sans addition de HEMA, TEGDMA

## AVANTAGES

**Thixotropie.** Ne coule pas. Permet l'élaboration de provisoires directement en bouche

Grande résistance à la flexion et légère élasticité

Couche d'inhibition de l'oxygène **a minima**

**Rebasable sur elle-même** pendant 1 à 3 jours max.

Temps de prise de 2min 45s

## INDICATIONS

### MÉTHODE INDIRECTE

Réalisation de couronnes provisoires et de bridges provisoires de moyenne à longue portée à partir d'une pré-empreinte.

Le produit étant assez dense, il est préférable d'injecter un peu de résine dans le sulcus des préparations avant de remettre la pré-empreinte chargée en bouche

### MÉTHODE DIRECTE

Réalisation de couronnes provisoires sur la dent préparée, en bouche. Une couronne temporaire peut ainsi être élaborée en 3 min maximum



## REFERENCES & PRESENTATIONS

**PHMD-50-A1** Cartouche 50ml A1 + 10 embouts mélangeurs

**PHMD-50-A2** Cartouche 50ml A2 + 10 embouts mélangeurs

**PHMD-50-A3** Cartouche 50ml A3 + 10 embouts mélangeurs

**EJ-100** Embouts mélangeurs jaunes x100

*Dispositif médical de classe IIa certifié par Tüv Rheinland (0197)*

## MÉTHODE DIRECTE

- Mettre un embout mélangeur bague jaune et un embout intra-oral sur la cartouche Injecter Phoenix MD directement sur la dent préparée et légèrement humide, en partant du sulcus
- Une fois la préparation totalement recouverte de résine, faire mordre le patient
- Après environ 40 secondes, la résine doit avoir atteint sa phase élastique
- Demander au patient d'ouvrir la bouche et désinsérer la provisoire
- La remettre en place plusieurs fois pour éviter qu'elle ne se bloque dans les embrasures
- Si possible en bouche, sculpter les faces linguales et vestibulaires avec une fraise diamantée, sous spray
- Sortir la couronne provisoire et finir les faces proximales
- Polir la couronne et la sceller provisoirement



1. 35 et 36 préparées et empreinte effectuée



2. Début d'injection de Phoenix MD en partant du sulcus



3. Aspect des couronnes provisoires après enregistrement de l'occlusion et polymérisation



4. Sculpture directement en bouche à l'aide d'une fraise diamantée sous spray



5. Bridge provisoire terminé et poli