

# HEALDENT

Fond de cavité protecteur et désensibilisant  
Formulation sans addition de TEGDMA, BisGMA

## AVANTAGES

**Facilité d'emploi** : attendre 10 sec après application et sécher légèrement avec un jet d'air

**S'utilise pur**. Ne nécessite ni conditionnement dentinaire, ni mélange, ni photo-polymérisation

**Efficacité désensibilisante immédiate & durable**

Action antibactérienne de surface

## INDICATIONS

**Fond de cavité**. Elimine les sensibilités post-opératoires après obturation. Compatible avec tous les composites et adhésifs du marché.

**Désensibilisateur**. Soulage la douleur au niveau du collet des dents

Avant le scellement d'un élément prothétique sur dent pulpée, pour éviter les sensibilités dues à l'acidité des ciments de scellement dans les premières 24h après la pose

Après détartrage, curetage et chirurgie parodontale

Dénudations radiculaires

## MÉCANISME D'ACTION

En se combinant aux protéines dentinaires, la résine permet un scellement des tubulis et rend la surface de la cavité étanche. L'agent anti-microbien détruit les germes présents à la surface de la dentine et participe à l'action du produit.

Le fluorure de sodium aide à la prévention de l'apparition ultérieure de carie en aidant à la reminéralisation de la dentine, ce qui induit aussi une amélioration de l'action désensibilisante du produit



## REFERENCES & PRESENTATIONS

**D-10** Flaçon de 10ml

Dispositif médical de classe IIa certifié par Tüv Rheinland (0197)