



Seal-Tight

Embouts de seringues air/eau à usage unique



Your practice is *our* inspiration.™

Seal-Tight® | Vous serez soufflés.

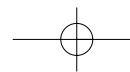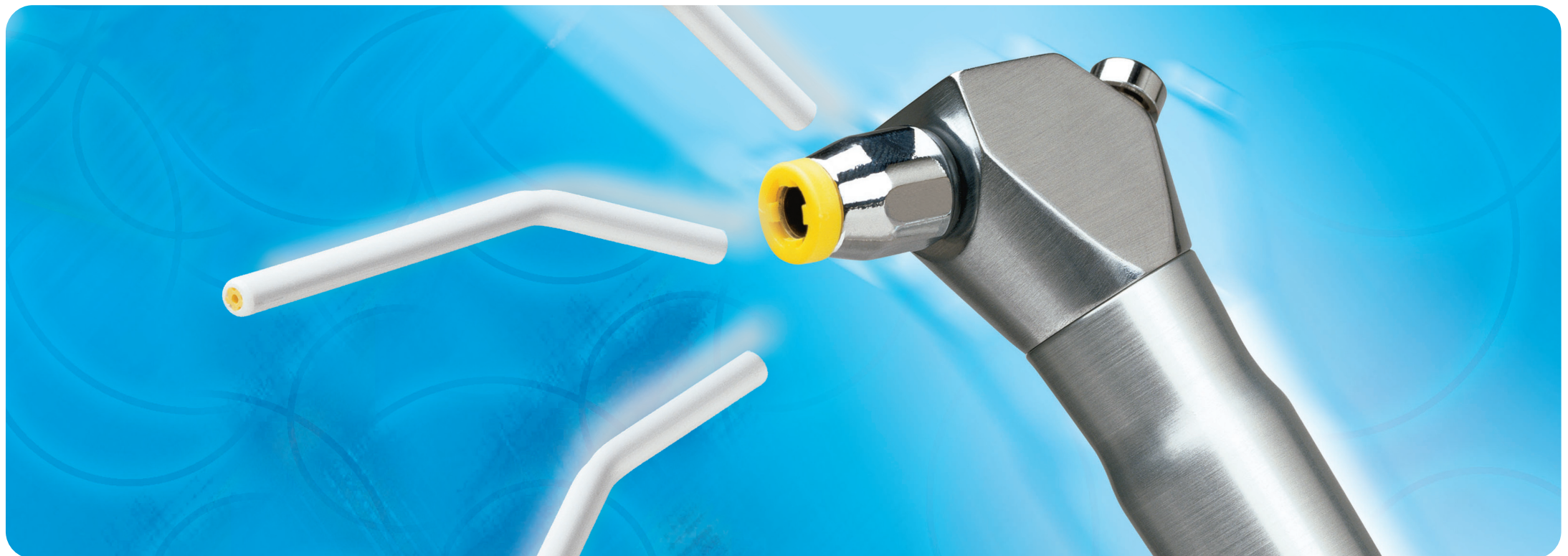

Seal-Tight


Embouts de seringues air/eau à usage unique.

Seal-Tight procure de l'air sec à chaque utilisation, ce qui assure les meilleurs résultats cliniques. Conçue pour un usage unique, Seal-Tight protègent vos patients contre les contaminations croisées. Protection maximale. Performance optimale.

- Air sec instantané – Aucun spray préalable pour éliminer les excès d'eau
- A usage unique – Lutte contre la contamination croisée
- Embouts coudés à 90° – sans effet sur le débit d'air et d'eau
- Remplacement des embouts rapide et simple
- Compatible avec les principaux types de seringues

Seal-Tight comporte un canal central et 5 canaux latéraux. Le canal central conduit l'eau et fonctionne comme un véritable joint torique. Les 5 canaux latéraux distribuent l'air. Ceci garantit un air sec à chaque utilisation et un spray doux et efficace sans excès d'eau pour le confort des patients. Les embouts Seal-Tight sont faciles à insérer et à remplacer. Pousser vers l'arrière la bague de rétention jaune et retirer l'embout Seal-Tight usagé. Seal-Tight procure de l'air sec lors de chaque utilisation, ceci contribue à l'obtention d'excellents résultats cliniques en particulier dans les procédures de collage.

- A usage unique. Pour une protection maximale contre les contaminations croisées
- Gain de temps. Pas d'étape de stérilisation, rationalise les plateaux techniques.
- Rigide. Peut servir d'écarteur en bouche et néanmoins peut être coudé à 90° sans effets sur le flux d'eau pour une meilleure ergonomie.
- Air sec. Le canal central assure une parfaite étanchéité et garantit de l'air continuellement sec.

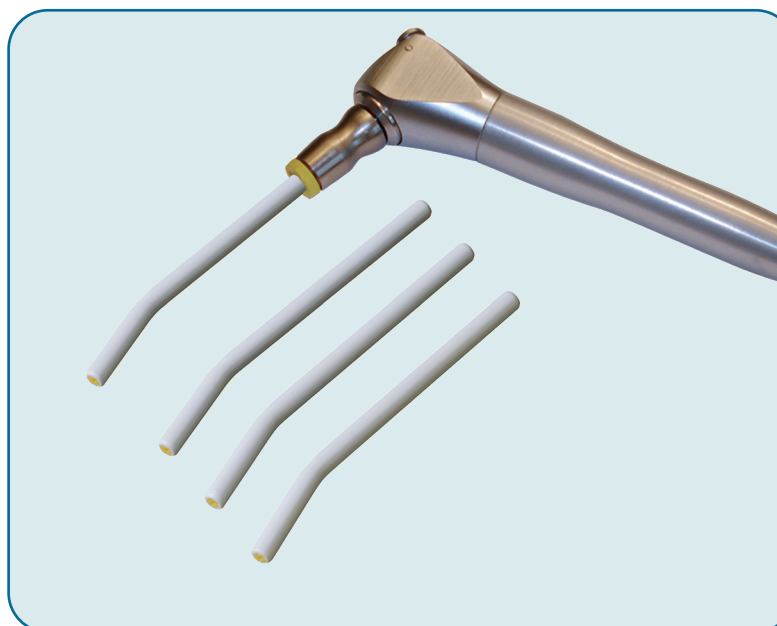

Conditionnement

Informations Seal-Tight

- PE77500 - Boîte de 1500 embouts
PE77200 - Pochette de distribution de 200 embouts

Informations adaptateurs Seal-Tight

- PE77021/A - Seringues « A-dec »
PE77022/M - Seringues «Engle/Macro»
PE77023/D - Seringues «Dental-Ez»
(toutes les seringues fabriquées après janvier 1997 utilisent l'adaptateur 77021)
PE77024/P - Seringues « Press Ring »
(à utiliser si la seringue a déjà été modifiée par un autre adaptateur)
PE77025/P - Seringues « Press Ring »
(utilisables uniquement si le mécanisme initial de bague de la seringue « Press Ring » est intact)
PE77026-K Adaptateur Seal-Tight (pour seringue Kavo 773.0500/773.0510)
PE77027-L Adaptateur Seal-Tight (pour seringue Luzzani MINI Light)
PE77028-S Adaptateur Seal-Tight (pour seringue Sirona Sprayvit 4000)


Consignes d'utilisation de Seal-Tight

Adaptateur : Indiqué pour plusieurs utilisations. Autoclavable jusqu'à 134°C, pour au moins 3 min.

Embouts : A usage unique.



KaVo

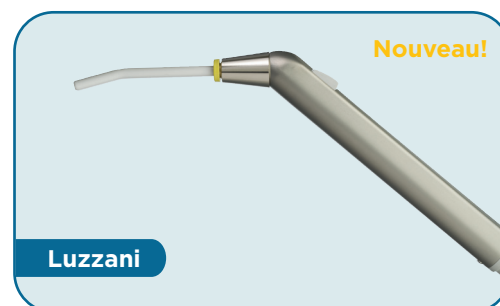

Luzzani



Sirona

PE77026-K pour : KaVo 1058, 1065, 1066, 1080

PE77027-L pour : Luzzani MINI light

PE77028-S pour : Sirona Sprayvit 4000