


SONICflex™ Livre des inserts

Aperçu des inserts KaVo SONICflex




KAVO

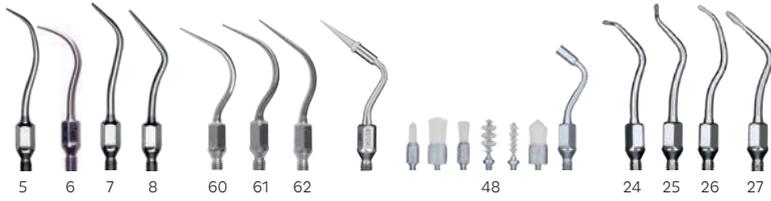

scaler | paro | implant | clean | root planer



micro | bevel | stripping, shaping | seal | cariex

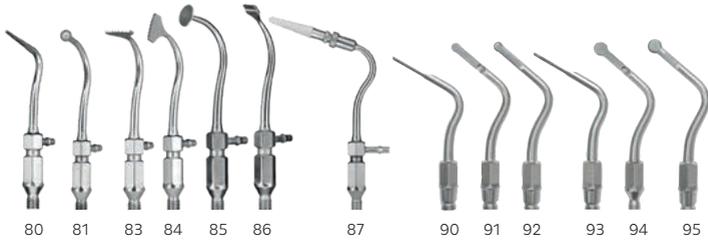

bone | crown extension

SONICflex - À la pointe de la polyvalence.

Grâce aux indications variées dont vous disposez avec le SONICflex, il deviendra rapidement l'un de vos instruments le plus utilisé. Ses nombreux inserts lui permettent de s'adapter exactement à vos besoins.



70 68 67 69 66 96 56 57 16 17 20 21 55

endo

retro



49 50 51 52 34 35 12 97 98

gold

ceram

CAD/CAM

CEM

crown

Options variées - vos atouts et avantages :

- Davantage d'inserts et ainsi de possibilités d'utilisation que tous les autres détarteurs
- Plus de 50 inserts différents
- Pour tous les domaines d'application
- La base d'un traitement invasif minimal réussi



Aperçu des instruments SONICflex™.



MASTER
series



EXPERT
series



SMART
series

Avec votre KaVo SONICflex, vous disposez du détartreur le plus puissant et le plus silencieux de sa catégorie. Il est sans aucun doute l'instrument ayant la plus large gamme d'indications.

Il sera votre allié fiable, puissant et précis grâce à ses 3 niveaux de puissance réglables en fonction des applications et des inserts utilisés.

Technique supérieure – Vos atouts et avantages :

- Puissance réglable sur trois niveaux – conditions de travail optimisées à chaque utilisation
- Sensiblement plus silencieux que ses concurrents directs (jusqu'à 15 dB) – moins de stress et de nuisances sonores pour l'équipe du cabinet et les patients
- Aucun accessoire supplémentaire n'est nécessaire ; il suffit de le brancher sur le raccord KaVo MULTIflex ou Sirona
- Meilleure éclairage : 25 000 Lux, pour une vision détendue sans fatigue des yeux
- Qualité KaVo éprouvée – le SONICflex 2008 L représente la troisième génération de détarteurs chez KaVo, issue de 25 années d'expérience et de connaissances

PROPHYLAXIE

Insert SONICflex scaler n° 5

Traitement : pour éliminer le tartre sur de grandes surfaces
Forme : Universel



N° de référence : Insert scaler n° 5
Insert scaler n° 5A

0.571.5171
1.005.8949

Insert SONICflex scaler n° 6 / 6A

Traitement : pour éliminer le tartre supra-gingival sur de grandes surfaces
Forme : Faucille



N° de référence : Insert scaler n° 6
Insert scaler n° 6A

0.571.5181
1.005.8950

Insert SONICflex scaler n° 7 / 7A

Traitement : pour éliminer le tartre supra-gingival sur de grandes surfaces
Forme : Paro



N° de référence : Insert scaler n° 7
Insert scaler n° 7A

0.571.5191
1.005.8951

**Informations importantes concernant
le numéro de référence:**

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex scaler n° 8 / 8A

Traitement : pour éliminer le tartre supra- et sous-gingival
Forme : paro, extra long





N° de référence : Insert scaler n° 8
Insert scaler n° 8A

0.571.5371
1.006.1953

Insert SONICflex scaler n° 48 / 48A

Traitement : élimination des plaques, nettoyage des fissures, nettoyage des cavités et des moignons
pour couronnes
Forme : différents embouts, balais à usage unique

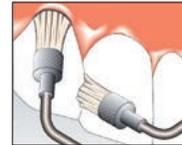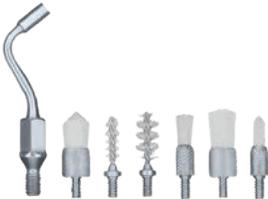

N° de référence : Insert scaler n°. 48
Insert scaler n°. 48A
Clean brush n°. 1
Clean brush n°. 2
Clean brush n°. 3
Clean brush n°. 4
Clean brush n°. 5
Clean brush n°. 6
Brush set
Brush set A


0.571.0401
1.006.1982
0.571.0402
0.571.0412
0.571.0422
0.571.0432
0.571.0472
0.571.0482
0.571.0001
1.006.2026

PARODONTOLOGIE

Insert SONICflex paro n° 60 / 60A

Traitement : nettoyage soigneux des poches en parodontologie ; nettoyage efficace des poches jusqu'à une profondeur de 9 mm ; Pour les incisives, les surfaces lisses

Forme : insert long et droit - surface arrondie

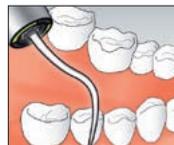

N° de référence : Insert paro n° 60
Insert paro n° 60A

0.571.7402
1.006.1934

Insert SONICflex paro n° 61 /61A

Traitement : nettoyage soigneux des poches en parodontologie ; nettoyage efficace des poches jusqu'à une profondeur de 9 mm ; pour prémolaires, molaires

Forme : insert coudé, **gauche** - surface arrondie



N° de référence : Insert paro n° 61
Insert paro n° 61A

0.571.7412
1.006.1935

Insert SONICflex paro n° 62 /62A

Traitement : nettoyage soigneux des poches en parodontologie ; nettoyage efficace des poches jusqu'à une profondeur de 9 mm ; pour prémolaires, molaires

Forme : insert coudé, **droite** -surface arrondie



N° de référence : Insert paro n° 62
Insert paro n° 62A

0.571.7422
1.006.1936

**Informations importantes concernant
le numéro de référence:**

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex implant

Traitement : retrait efficace de dépôts et concrétions sous-gingivales en cas d'implants
Forme : inserts cunéiformes, partie en plastique à usage unique (PEEK)



N° de référence : Implant set
Implant set A
Implant refill (30 pcs)

1.003.8167
1.006.2027
1.003.8168

PARODONTOLOGIE

Insert SONICflex rootplaner n° 24 / 24A

Traitement : pour furcations difficilement accessibles, permet également l'accès aux entrées proximales des furcations dans le cas où la rangée dentaire est fermée

Forme : bouton à contre-angle, petit, **gauche**, diamantation D25



N° de référence : Insert rootplaner n° 24
Insert rootplaner n° 24A

0.571.5621
1.006.1957

Insert SONICflex rootplaner n° 25 / 25A

Traitement : pour furcations difficilement accessibles, permet également l'accès aux entrées proximales des furcations dans le cas où la rangée dentaire est fermée

Forme : bouton à contre-angle, petit, **droite**, diamantation D25



N° de référence : Insert rootplaner n° 25
Insert rootplaner n° 25A

0.571.5631
1.006.1959

Insert SONICflex rootplaner n° 26 / 26A

Traitement : nettoyage efficace de surfaces lisses et de concavités

Forme : universel, bouton, **petit** ; diamantation D25



N° de référence : Insert rootplaner n° 26
Insert rootplaner n° 26A

0.571.5641
1.006.1961

Informations importantes concernant
le numéro de référence:

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex rootplaner n° 27 / 27A

Traitement : nettoyage efficace de surfaces lisses et de concavités
Forme : paro extra long, bouton, **grand** ; diamantation D25



N° de référence : Insert rootplaner n° 27
Insert rootplaner n° 27A

0.571.5651
1.006.1963

INVASIF AU MINIMUM

Insert SONICflex micro n° 30 / 30A

Traitement : thérapie peu invasive en début de caries
Forme : petite demi-sphère, **mésiale**, diamantation D46




N° de référence : Insert micro n° 30 / 30A
Insert micro n° 30 / 30A

0.571.6811
1.006.1969

Insert SONICflex micro n° 31 / 31A

Traitement : thérapie peu invasive en début de caries
Forme : petite demi-sphère, **distale**, diamantation D46

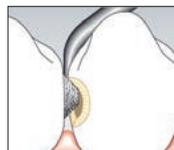


N° de référence : Insert micro n° 31
Insert micro n° 31A

0.571.6801
1.006.1971

Insert SONICflex micro n° 32 / 32A

Traitement : thérapie peu invasive en début de caries
Forme : grande demi-sphère, **mésiale**, diamantation D46

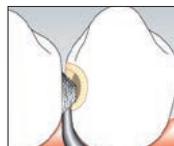

N° de référence : Insert micro n° 32
Insert micro n° 32A


0.571.6831
1.006.1973

Informations importantes concernant
le numéro de référence:

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex micro n° 33 / 33A

Traitement : thérapie peu invasive en début de caries
Forme : grande demi-sphère, **distale**, diamantation D46

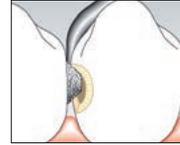

N° de référence : Insert micro n° 33
Insert micro n° 33A

0.571.6821
1.006.1975

Insert SONICflex bevel n° 58 / 58A

Traitement : les bords proximaux des cavités sont coupés en biais
Forme : **mésiale**, diamantation D46



N° de référence : Insert bevel no. 58
Insert bevel no. 58A

0.571.7392
1.006.1988

Insert SONICflex bevel n° 59 / 59A

Traitement : les bords proximaux des cavités sont coupés en biais
Forme : **distale**, diamantation D46



N° de référence : Insert bevel no. 59
Insert bevel no. 59A

0.571.7382
1.006.1990

INVASIF AU MINIMUM

Insert SONICflex seal n° 45 / 45A

Traitement : préparation invasive minimale des puits et fissures
Forme : cône, insert droit Ø 0,5 mm, diamantation D46



N° de référence : Insert seal n° 45
Insert seal n° 45A

1.000.8323
1.007.1506

Insert SONICflex cariex D n° 42 / 42A

Traitement : fine excavation de caries conservatrice pour la substance et sonoabrasive
Forme : forme de bille, Ø 0,8 mm, diamantation D64



N° de référence : Insert cariex D n° 42
Insert cariex D n° 42A

1.000.7105
1.006.1980

Insert SONICflex cariex D n° 43 / 43A

Traitement : fine excavation de caries conservatrice pour la substance et sonoabrasive
Forme : forme de bille, Ø 1,2 mm, diamantation D64



N° de référence : Insert cariex D n° 43
Insert cariex D n° 43A

1.000.7167
1.006.1981

**Informations importantes concernant
le numéro de référence:**

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex cariex TC n° 71 / 71A

Traitement : élimination par couches de la partie principale de la substance cariée
Forme : forme de bille, Ø 1,0 mm, métal dur



N° de référence : Insert cariex TC n° 71 / 71A
Insert cariex TC n° 71 / 71A

1.000.7362
1.006.2002

Insert SONICflex cariex TC n° 72 / 72A

Traitement : élimination par couches de la partie principale de la substance cariée
Forme : forme de bille, Ø 1,4 mm, métal dur



N° de référence : Insert cariex TC n° 72
Insert cariex TC n° 72A


1.000.7363
1.006.2004

PROTHÈSE DENTAIRE

Insert SONICflex prep gold n° 49 / 49A mésial

Traitement : préparation précise de différents angles de coupe dans la zone marginale après préparation préalable avec un instrument rotatif et ce, pour améliorer la technique de restauration

Forme : **mésiale**, inserts avec angles de coupe définis : latéral - 60° cervical - 30°, diamantation D46

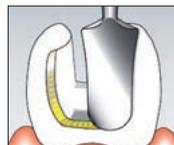


N° de référence : Insert prep gold n° 49
Insert prep gold n° 49A

0.571.7212
1.006.1983

Insert SONICflex prep gold n° 50 / 50A distal

Traitement : préparation précise de différents angles de coupe dans la zone marginale après préparation préalable avec un instrument rotatif et ce, pour améliorer la technique de restauration

Forme : **distale**, inserts avec angles de coupe définis : latéral - 60°, cervical - 30°, diamantation D46

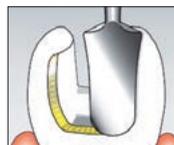

N° de référence : Insert prep gold n° 50
Insert prep gold n° 50A

0.571.7222
1.006.1984

Insert SONICflex prep ceram n° 51 / 51A

Traitement : préparation précise de différents angles de coupe dans la zone marginale, transitions harmonieuses des zones marginales cervicales et latérales

Forme : **mésiale**, inserts avec angles de coupe définis : latéral - 60°, cervical - 75°, diamantation D46



N° de référence : Insert prep ceram n° 51
Insert prep ceram n° 51A

0.571.7262
1.006.1985

**Informations importantes concernant
le numéro de référence:**

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex prep ceram n° 52 / 52A

Traitement : préparation précise de différents angles de coupe dans la zone marginale, transitions harmonieuses des zones marginales cervicales et latérales

Forme : **distale**, inserts avec angles de coupe définis, latéral - 60°, cervical - 75°,
diamantation D46



N° de référence : Insert prep ceram n° 52
Insert prep ceram n° 52A

0.571.7272
1.006.1986

PROTHÈSE DENTAIRE

Insert SONICflex prep CAO/FAO n° 34 / 34A

Traitement : accord parfait de la préparation des cavités sur les processus de travail techniques dans les systèmes CAO-FAO

Forme : **mésiale**, angle latéral de 30°, angle cervical de 90°, diamantation D46




N° de référence : Insert prep CAO/FAO n° 34
Insert prep CAO/FAO n° 34A

1.002.1984
1.006.1977

Insert SONICflex prep CAO/FAO n° 35 / 35A

Traitement : accord parfait de la préparation des cavités sur les processus de travail techniques dans les systèmes CAO-FAO

Forme : **distale**, angle latéral de 30°, angle cervical de 90°, diamantation D46

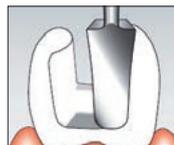

N° de référence : Insert prep CAO/FAO n° 35
Insert prep CAO/FAO n° 35A

1.002.1986
1.006.1979

**Informations importantes concernant
le numéro de référence:**

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex stripping n° 73 / 73A

Traitement : Séparation avant le début de la préparation coronaire
Arrondissement des zones de transition sur la limite de préparation proximale dans le cadre d'une préparation cavitaire
Modification anatomique des surfaces proximales des obturations en composite
Réduction proximale de l'émail dans le cadre de l'orthopédie dentofaciale

Forme : plat, mésial, diamanté, (D25)



N° de référence : Insert stripping n° 73
Insert stripping n° 73A

1.011.2993
1.011.2994

Insert SONICflex stripping n° 74 / 74A

Traitement : Séparation avant le début de la préparation coronaire
Arrondissement des zones de transition sur la limite de préparation, proximale dans le cadre d'une préparation cavitaire
Modification anatomique des surfaces proximales des obturations en composite
Réduction proximale de l'émail dans le cadre de l'orthopédie dentofaciale

Forme : plat, distale, diamanté, (D25)



N° de référence : Insert stripping n° 74
Insert stripping n° 74A

1.011.2995
1.011.2996

PROTHÈSE DENTAIRE

Insert SONICflex shaping n° 75 / 75A

Traitement : Séparation avant le début de la préparation coronaire
Arrondissement des zones de transition sur la limite de préparation proximale dans le cadre d'une préparation cavitaire
Modification anatomique des surfaces proximales des obturations en composite
Réduction proximale de l'émail dans le cadre de l'orthopédie dentofaciale

Forme : convexe, mésial, diamanté, (D 25)



N° de référence : Insert shaping n° 75
Insert shaping n° 75A

1.011.2997
1.011.2998

Insert SONICflex shaping n° 76 / 76A

Traitement : Séparation avant le début de la préparation coronaire
Arrondissement des zones de transition sur la limite de préparation proximale dans le cadre d'une préparation cavitaire
Modification anatomique des surfaces proximales des obturations en composite
Réduction proximale de l'émail dans le cadre de l'orthopédie dentofaciale

Forme : convexe, distale, diamanté, (D 25)



N° de référence : Insert shaping n° 76
Insert shaping n° 76A

1.011.2999
1.011.3000

**Informations importantes concernant
le numéro de référence:**

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex cem n° 12 / 12A

Traitement : Pose en douceur d'inlays
Forme : bouchon arrondi en plastique



N° de référence : Insert cem n° 12
Insert cem n° 12A
Embout Cem

0.571.5431
1.006.2021
0.571.7142

Insert SONICflex crown prep n° 97 / 97A

Traitement : préparation corono-périphérique (moignons)- l'idéal pour cette indication est la combinaison d'instruments de préparation rotatifs pour couronnes et d'inserts sonores
Forme : arrondie, diamantation D46




N° de référence : Insert crown prep n° 97
Insert crown prep n° 97A

1.008.6383
1.008.6384

Insert SONICflex crown prep n° 98 / 98A

Traitement : préparation corono-périphérique (moignons) - l'idéal pour cette indication est la combinaison d'instruments de préparation rotatifs pour couronnes et d'inserts sonores.
Forme : plat, diamantation D46

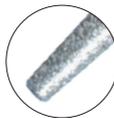

N° de référence : Insert crown prep n° 98
Insert crown prep n° 98A

1.008.6385
1.008.6386

RÉSECTION APICALE

Insert SONICflex retro n° 56 / 56A

Traitement : Recherche du canal radulaire. Travail considérablement facilité en ce qui concerne la préparation rétrograde réelle des cavités

Forme : insert cylindrique extrêmement étroit, **gauche**, diamantation D46



N° de référence : Insert retro n° 56
Insert retro n° 56A

0.571.7322
1.006.2040

Insert SONICflex retro n° 57 / 57A

Traitement : Recherche du canal radulaire. Travail considérablement facilité en ce qui concerne la préparation rétrograde réelle des cavités

Forme : insert cylindrique extrêmement étroit, **droite**, diamantation D46



N° de référence : Insert retro n° 57
Insert retro n° 57A

0.571.7332
1.006.2041

Insert SONICflex retro n° 16 / 16A

Traitement : préparation du canal radulaire, accès considérablement facilité en cas de forte courbure articulaire

Forme : **gauche**, petit cylindre, diamanté D64



N° de référence : Insert retro n° 16
Insert retro n° 16A

0.571.5541
1.006.2036

**Informations importantes concernant
le numéro de référence:**

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex retro n° 17 / 17A

Traitement : préparation du canal radiculaire, accès considérablement facilité en cas de forte courbure articulaire

Forme : **droite**, petit cylindre, diamantation D64



N° de référence : Insert retro n° 17
Insert retro n° 17A

0.571.5581
1.006.2035

Insert SONICflex retro n° 20 / 20A et n° 21 / 21A

Traitement : Préparation de l'incision inférieure. Préparation, adaptée aux axes, du canal radiculaire en cas de défaut minimal des os

Forme : en forme de poire, **petit, gauche**, diamantation D46



N° de référence : Insert retro n° 20
Insert retro n° 20A

0.571.5521
1.006.2037

N° de référence : en forme de poire, **petit, droite**, diamantation D46



N° de référence : Insert retro n° 21
Insert retro n° 21A

0.571.5561
1.006.2038

Insert SONICflex retro n° 55 / 55A

Traitement : pour les racines dont les pointes sont fortement inclinées vers l'oral

Forme : diamantation D46



N° de référence : Insert retro n° 55
Insert retro n° 55A

0.571.7342
1.006.2039

ENDODONTIE

Insert SONICflex endo n° 66 / 66A

Traitement : Mise en oeuvre de la cavité d'accès, élimination d'excédents
Forme : bouton, **grand**, diamantation D46




N° de référence : Insert endo n° 66
Insert endo n° 66A

1.000.5825
1.006.1992

Insert SONICflex endo n° 67 / 67A

Traitement : Extension de grands canaux
Forme : cône **125°**, diamantation D46

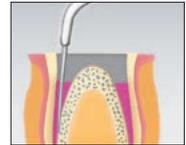

N° de référence : Insert endo n° 67
Insert endo n° 67A

1.000.5822
1.006.1994

Insert SONICflex endo n° 68 / 68A

Traitement : Extension de grands canaux
Forme : cône **112°**, diamantation D46



N° de référence : Insert endo n° 68
Insert endo n° 68A


1.000.5823
1.006.1996

**Informations importantes concernant
le numéro de référence:**

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex endo n° 69 / 69A

Traitement : Élimination des résidus de remplissage du canal radicaire
Forme : bouton, **petit**, diamantation D46

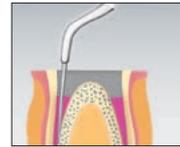

N° de référence : Insert endo n° 69
Insert endo n° 69A

1.000.5827
1.006.1998

Insert SONICflex endo n° 70 / 70A

Traitement : pour canaux particulièrement longs et larges
Forme : cônica **117°**, diamantation D25 la partie avant n'est pas diamantée



N° de référence : Insert endo n° 70
Insert endo n° 70A

1.000.5821
1.006.2000

Insert SONICflex Endo clean n° 96 / 96A

Traitement : pour le rinçage du canal radicaire, l'élimination des débris et de la boue dentinaire (smear layer) et potentialisation de l'action de la solution de rinçage antibactérienne.
Forme : angles de 105° et de 75°



N° de référence :
1X support N° 96 / 96A et 6X endo clean seringues 015, 020 et 025 :
Set: 1.006.2045 | Set A: 1.007.1142

Endo clean support no. 96 :
1.008.5163 | A: 1.008.5164

Endo clean seringues (6pcs) pour tous les SONICflex :

015 white: 1.006.2042 | 020 yellow: 1.006.2043 | 025 red: 1.006.2044



CHIRURGIE

Insert SONICflex crown extension 020 n° 90 / 90A

Traitement : Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :

Forme : tracé d'arcade asymétrique, Sourire gingival, Atteinte de l'espace biologique petit, droit, surface extérieure diamantée (D46)



N° de référence : Insert crown extension 020 n° 90
Insert crown extension 020 n° 90A

1.011.3001
1.011.3002

Insert SONICflex crown extension 020 n° 91 / 91A

Traitement : Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :

Forme : tracé d'arcade asymétrique, Sourire gingival, Atteinte de l'espace biologique small, oblique, diamond-coated outer surface D46



N° de référence : Insert crown extension 020 n° 91
Insert crown extension 020 n° 91A

1.011.3003
1.011.3004

**Informations importantes concernant
le numéro de référence:**

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex crown extension 020 n° 92 / 92A

Traitement: Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :
tracé d'arcade asymétrique, Sourire gingival, Atteinte de l'espace biologique

Forme: petit, oblique, surface extérieure diamantée (D46)



N° de référence: Insert crown extension 020 n° 92
Insert crown extension 020 n° 92A

1.011.3005
1.011.3006

Insert SONICflex crown extension 030 n° 93 / 93A

Traitement : Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :
tracé d'arcade asymétrique, Sourire gingival, Atteinte de l'espace biologique

Forme : grand, droit, surface extérieure diamantée (D46)



N° de référence : Insert crown extension 030 n° 93
Insert crown extension 030 n° 93A

1.011.3007
1.011.3008

CHIRURGIE

Insert SONICflex crown extension 030 n° 94 / 94A

Traitement : Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :

Forme : tracé d'arcade asymétrique, Sourire gingival, Atteinte de l'espace biologique grand, oblique, surface extérieure diamantée (D46)



N° de référence : Insert crown extension 030 n° 94
Insert crown extension 030 n° 94A

1.011.3009
1.011.3010

Insert SONICflex crown extension 030 n° 95 / 95A

Traitement : Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :

Forme : tracé d'arcade asymétrique, Sourire gingival, Atteinte de l'espace biologique petit, oblique, surface extérieure diamantée (D46)



N° de référence : Insert crown extension 030 n° 95
Insert crown extension 030 n° 95A

1.011.3011
1.011.3012

**Informations importantes concernant
le numéro de référence:**

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex bone n° 80 / 80A

Traitement : Séparation des fibres de Sharpey. Élargissement de l'alvéole : retrait de résidus de racines, extraction en douceur avant implantation, section d'os

Forme : carrée, tranchante



N° de référence : Insert bone n° 80
Insert bone n° 80A

1.004.3875
1.006.2006

Insert SONICflex bone n° 81 / 81A

Traitement : Préparation de la fenêtre osseuse pour le sinus lift. En cas d'os très massifs, séparer la substance corticale par une rotation et enlever l'os restant avec l'insert diamanté

Forme : bille, grande, diamantation D46



N° de référence : Insert bone n° 81
Insert bone n° 81A

1.004.3876
1.006.2008

Insert SONICflex bone n° 83 / 83A

Traitement : prélèvement de blocs d'os, ostéotomies (distraktion, section d'os). En cas de substance corticale extrêmement épaisse, travailler au préalable de manière rotative le cas échéant scie sagittale

Forme :



N° de référence : Insert bone n° 83
Insert bone n° 83A

1.004.3878
1.006.2012

CHIRURGIE

Insert SONICflex bone n° 84 / 84A

Traitement : prélèvement de blocs d'os, ostéotomies (distraction, section d'os). En cas de substance corticale extrêmement épaisse, travailler au préalable de manière rotative le cas échéant

Forme : scie axiale



N° de référence : Insert bone n° 84
Insert bone n° 84A

1.004.3879
1.006.2014

Insert SONICflex bone n° 85 / 85A

Traitement : Idéal pour décoller en toute sécurité la membrane de Schneider lors d'un sinus lift grâce à sa forme de disque

Forme : pied d'éléphant




N° de référence : Insert bone n° 85
Insert bone n° 85A

1.006.0645
1.007.1624

Insert SONICflex bone n° 86 / 86A

Traitement : Idéal pour un prélèvement rapide et facile de quantités d'os importantes, en particulier pour le sinus lift

Forme : grattoir

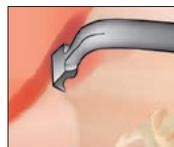

N° de référence : Insert bone n° 86
Insert bone n° 86A

1.006.0741
1.007.1625

**Informations importantes concernant
le numéro de référence:**

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

Insert SONICflex bone n° 87 / 87A

Traitement : Idéal pour des incisions fines pour détacher les ligaments
Forme : scie axiale, lames de scie remplaçables
épaisseur de la lame de scie: 0,15 mm



N° de référence :	Insert bone n° 87	1.006.1406
	Insert bone n° 87A	1.007.1627
	Lame de scie (5 pièces)	1.006.1405

Accessoires :



clé dynamométrique

1.000.4887



Cassette stérile

0.411.9101



clé

0.411.0892



pièce intermédiaire pour l'alimentation de liquide
médicamenteux pour SONICflex 2003 / 2008

1.000.6296

A: 1.006.5966

L'excellence dentaire dans tous les domaines.



Équipements de cabinet dentaire

Unités de soin et scialytiques KaVo, fauteuils dentaires, systèmes de communication avec les patients, microscope dentaire, et autres instruments.



Instruments

Pièces-à-main et contre-angles dentaires, turbines, systèmes d'aéropolissage et petits appareils pour tous les domaines d'application, notamment le diagnostic, la prophylaxie, les soins de restauration, la chirurgie, l'endodontie et l'entretien des instruments.



Imagerie

Équipements de radiographies intraorales, capteurs et systèmes de plaques d'imagerie numérique, dispositifs de radiographie panoramique et céphalométrique combinés au CBCT, ainsi que des appareils dédiés au CBCT pour toute application dans le domaine des soins dentaires.



CAO/FAO

Solutions CAO/FAO adaptées aux dentistes et aux prothésistes dentaires, pour des soins avec des résultats esthétiques, naturels et durables.

Les produits, fonctionnalités et services indiqués et décrits dans ce catalogue ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Toutes les caractéristiques étaient exactes au moment de la publication. KaVo Dental GmbH n'est pas responsable des différences de couleur ou de forme par rapport aux illustrations, et n'est pas responsable des fautes ou des erreurs d'impression. KaVo Dental GmbH se réserve le droit de modifier les brochures à tout moment. La réimpression, même partielle, n'est autorisée qu'avec le consentement de KaVo Dental GmbH.

Dispositif Medical (DM) Classe IIa pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. L'ensemble des produits présent sur ce document sont fabriqués par les sociétés Kaltenbach & Voigt GmbH – Organisme notifié: 0124 – Date de parution mai 2018.