



Lingettes désinfectantes prêtes à l'emploi pour la désinfection et le nettoyage des surfaces et dispositifs médicaux sensibles.

mikrozid[®] sensitive wipes

Notre plus

- Sans alcool
- Lingettes désinfectantes imprégnées, prêtes à l'emploi
- Excellente efficacité rapide
- Pour les surfaces sensibles à l'alcool
- Bonne efficacité nettoyante
- En sachet souple pratique

Domaines d'utilisation

Les lingettes « mikrozid sensitive wipes » sont indiquées, en raison de leur bonne compatibilité des matériaux, pour la désinfection de dispositifs médicaux et autres surfaces sensibles à l'alcool.

Pour l'inventaire médical au sens de la loi sur les dispositifs médicaux (MPG):

- Les dispositifs médicaux qui ne peuvent être immergés tels que les stéthoscopes ou les têtes à ultrasons pour les examens abdominaux.
- Pour les dispositifs médicaux semi-critiques (p. ex. les sondes vaginales), une désinfection finale virucide doit être effectuée.

Pour les surfaces conformément à l'ordonnance sur les produits biocides (BPR):

- Les surfaces de travail sensibles dans les hôpitaux, les ambulances, les cabinets médicaux et dentaires.
- Petites surfaces de travail dans les maisons de retraite, homes médicalisés et les laboratoires médicaux.

Conseils d'utilisation

Avant la désinfection, veuillez-vous assurer que toutes les saletés visibles soient éliminées. Lorsque vous ouvrez le sachet et retirez la première lingette, veuillez à respecter les aspects d'hygiène.

Frotter soigneusement la surface avec la lingette imprégnée et laisser agir la solution. Veiller à ce que toute la surface soit humide.

Après usage, vérifier que le clapet du couvercle soit bien fermé. Sous réserve d'une manipulation conforme, schülke garantit une durée de conservation de 3 mois après ouverture du sachet.

Efficacité microbiologique

Efficacité	Concentration	Temps de contact
Bactéries <i>Selon les recommandations VAH temps de contact court</i>	prêtes à l'emploi	1 min
SARM	prêtes à l'emploi	1 min
Levure <i>Selon les recommandations VAH temps de contact court</i>	prêtes à l'emploi	1 min
activité virucide limitée	prêtes à l'emploi	1 min
norovirus <i>EN14476</i>	prêtes à l'emploi	15 min
polyomavirus SV 40	prêtes à l'emploi	1 min
rotavirus	prêtes à l'emploi	1 min

Certificats

- IHO listed
- VAH certificate



mikrozid[®] sensitive wipes

Données relatives au produit

Composition:

100g de solution active contiennent : 0,26 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)); 0,26 g Didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC), 0,26 g Alkyl(C12-14)ethylbenzylammoniumchlorid (ADEBAC (C12-C14))

Données physico-chimiques

Couleur	incolore
Densité	env. 1,00 g/cm ³ / 20 °C
pH	6 - 8 / 20 °C
Point d'éclair	Non applicable
Routine FORM	liquide
Viscosité dynamique	non déterminé

Remarques particulières

Concerne les recharges pour les boîtes

Commencer par se désinfecter les mains et enfiler des gants de protection neufs. Lors de la recharge, veiller à ce que les gants ne soient pas contaminés par d'autres manipulations. À chaque recharge, le clapet du couvercle doit être désinfecté. Pour ce faire, celui-ci est nettoyé et désinfecté au moyen d'un produit de désinfection de surfaces alcoolisé. De même, veiller lors de la recharge à ce que le rouleau de lingettes, sachet d'emballage compris, soit placé dans le distributeur. Par ailleurs, schülke recommande de renoncer à l'utilisation de recharges dans les zones à haut risque.

Dimensions des lingettes disponibles:

- mikrozid[®] sensitive wipes *Jumbo* (10 x 200 Lingettes 20 x 20 cm) portée** : env. 0,5 m²
- mikrozid[®] sensitive wipes *Jumbo Refill* (12 x 200 Lingettes 20 x 20 cm) portée** : env. 0,5 m²
- mikrozid[®] sensitive wipes premium (12 x 50 Lingettes 20 x 20 cm)* portée** : env. 1,0 m²
- mikrozid[®] sensitive wipes premium (6 x 100 Lingettes 20 x 20 cm)* portée** : env. 1,0 m²
- mikrozid[®] sensitive wipes *premium maxi* (6 x 80 Lingettes 25 x 25 cm) portée** : env. 1,5m²

Utilisez les produits désinfectants avec précaution. Avant l'emploi, veuillez toujours observer l'étiquette et les informations sur le produit.

S'agissant de désinfectants de surfaces, il est impératif de vérifier si le spectre d'action répond à vos besoins: «Les produits de désinfection se distinguent notamment par leur spectre d'action sur les microorganismes. C'est dont vous devez tenir compte lors du choix d'un désinfectant adéquat»¹ Notez qu'il existe des cas de souches bactériennes qui présentent une sensibilité réduite ou un développement de tolérance aux produits de désinfection.¹ Dans de tels cas, certains produits à base de composés d'ammonium quaternaire, pourraient alors ne pas être assez efficaces. C'est pourquoi schülke recommande pour la désinfection des

surfaces des zones à haut risque (comme par ex, les soins intensifs, l'hémo- oncologie, la néonatalogie ou la station de combustion) entre autre les lingettes mikrozid[®] PAA ou les lingettes mikrozid[®] AF. Leurs propriétés garantissent, en effet, un large spectre d'action.

Ne convient pas à la désinfection de dispositifs médicaux invasifs.

BAG-RegNr.: CHZN1398

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
mikrozid sensitive wipes prem 100 ST SP	6/Carton	70000807
mikrozid sens wipes prem maxi 80 ST SP	6/Carton	70001004
mikrozid sensitive wipes prem 50 ST SP	12/Carton	70000806
mikrozid sens wipes Jum Ref 200 ST BT	12/Carton	70001404
mikrozid sensitive wipes Jumbo 200 St DS	10/Carton	109184
mikrozid sens wipes Jumbo Ref 12x200 KT	1/Carton	109190

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information

Sur le site Internet www.schuelke.ch, vous trouverez un aperçu de tous les certificats relatifs aux lingettes mikrozid[®] sensitive wipes.

Pour vos questions individuelles:
Customer Sales Service
Tél.: +41 44 466 55 44
E-mail: mail.ch@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

Air Liquide
HEALTHCARE Une société du groupe Air Liquide

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Suisse
Tél +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com