



Désinfectant à l'oxygène actif pour le nettoyage et la désinfection manuels des instruments. Avec formule multienzymes.

## gigasept® pearls

### Notre plus

- efficacité microbiologique complète grâce à la combinaison d'un agent synergique et de l'oxygène actif
- excellente performance de nettoyage grâce à sa formule multi-enzymes en combinaison avec un pH neutre (ne fixe pas les protéines) et des tensio-actifs puissants
- excellente compatibilité des matériaux même avec des matériaux sensibles comme les endoscopes flexibles
- une plus grande sécurité pour l'utilisateur grâce à sa structure en perles innovante, sans poussière (donc pas de risque d'inhalation)
- parfum étonnamment agréable

### Efficacité microbiologique

Efficacité	Concentration	Temps de contact
<b>Bactéries</b> EN13727, EN14561, Conformément à la VAH - en conditions de saleté	1 % (10 ml/l)	10 min
<b>Bactéries</b> EN13727, EN14561, Conformément à la VAH - en conditions de saleté	2 % (20 ml/l)	5 min
<b>Bactéries</b> EN13704 - en conditions de saleté	2 % (20 ml/l)	5 min
<b>Bacille de la Tuberculose</b> Conformément à la VAH - en conditions de saleté	1 % (10 ml/l)	15 min
<b>Bacille de la Tuberculose</b> EN14348, EN14563, Conformément à la VAH - en conditions de saleté	2 % (20 ml/l)	5 min
<b>Levure</b> EN13624, EN14562, Conformément à la VAH - en conditions de saleté	1 % (10 ml/l)	10 min

Efficacité	Concentration	Temps de contact
<b>Levure</b> EN13624, EN14562, Conformément à la VAH - en conditions de saleté	2 % (20 ml/l)	5 min
<b>Fongique</b> EN13624 - en conditions de saleté	2 % (20 ml/l)	30 min
<b>Virus</b> Conformément à la directive de la DVV (Association allemande de lutte contre les maladies virales, association déclarée) / RKI - en conditions de saleté	1 % (10 ml/l)	30 min
<b>Virus</b> EN14476, Conformément à la directive de la DVV (Association allemande de lutte contre les maladies virales, association déclarée) / RKI - en conditions de saleté	2 % (20 ml/l)	10 min
<b>Clostridium difficile</b> EN13704 - en conditions de saleté	1 % (10 ml/l)	30 min
<b>Bacillus subtilis</b> EN13704 - en conditions de saleté	1 % (10 ml/l)	30 min
<b>Bacillus subtilis</b> EN13704 - en conditions de saleté	2 % (20 ml/l)	15 min

CE 0297



## Données relatives au produit

### Composition:

100 g de granules contiennent les agents actifs: 43,0 g percarbonate de sodium, 22,0 g tétraacétyléthylènediamine

### Marquage conforme au Règlement CE N°. 648/2004:

> 30 % agent de blanchiment à base d'oxygène, < 5 % tensio-actifs non-ioniques, < 5 % phosphate, < 5 % EDTA et ses sels, enzymes, parfum

### Données physico-chimiques

Couleur	bleu clair
pH	env. 8 / 20 g/l / 20 °C / mélangé à l'eau
Point d'éclair	Non applicable
Routine FORM	granuleux
Viscosité dynamique	Non applicable

## Remarques particulières

### Domaines d'utilisation

Nettoyage et désinfection universels d'instruments médicaux thermostables et thermolabiles de tout type. Convient en particulier aux endoscopes flexibles et aux matériaux sensibles comme le silicone, le polycarbonate, le polysulfone et le verre acrylique. Par ailleurs, sa formule spéciale lui permet d'être utilisé dans les bains à ultrasons.

### Instructions d'utilisation

Les granules du désinfectant pour instruments se diluent dans de l'eau froide à la concentration d'utilisation souhaitée.

Dosage: selon l'efficacité microbiologique 1,0 % - 2,0 %.

Exemple d'utilisation: 10 litres d'une solution à 2 % correspondent à 9,8 litres d'eau et 200 g (200g = 300ml) de gigasept® pearls. Après avoir ajouté la quantité de granules correspondante, veuillez remuer plusieurs fois, les premières 15 minutes. Une fois cette durée d'activation écoulée, la solution est prête à l'emploi. Les petits résidus non dilués n'ont pas d'influence sur l'efficacité de la solution mais forment un dépôt d'activité efficace. Placer les endoscopes et instruments à traiter dans la solution immédiatement après utilisation. Veiller à leur imprégnation complète, à celle des instruments à corps creux également, et laisser agir. Après le nettoyage, rincer les instruments abondamment, avec de l'eau de qualité potable au moins et de préférence avec de l'eau déminéralisée, pour enlever complètement les résidus de la solution désinfectante. Veuillez respecter les recommandations de traitement du fabricant d'instruments. Ne pas mélanger avec des nettoyeurs ni d'autres désinfectants. Ne convient pas aux instruments en laiton et en cuivre ni aux instruments chromés ou nickelés mécaniquement endommagés. Conformément aux recommandations RKI, renouveler la solution tous les jours de travail et en cas de contamination visible importante.

La durée limite d'emploi de la solution non contaminée est de 24 heures maximum.

Grâce à l'addition d'excipients spéciaux, le pH de gigasept® granulate est maintenu neutre grâce à une solution tampon. On évite ainsi une coagulation des protéines (fixation des

protéines sur les surfaces) tout en obtenant une compatibilité optimale avec des matériaux.

En cas de déplacement de petites quantités de la solution d'application hors du nettoyage préliminaire, aucune interaction n'est attendue avec des nettoyeurs ni avec des agents désinfectants provenant du traitement mécanique des endoscopes (p. ex. glutaraldéhyde et base d'acide peracétique).

## Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
gigasept pearls 1,5 kg EM	4/Carton	70000179
gigasept pearls 6 kg EM	2/Carton	70000178

## Informations environnementales

schülke fabrique ses produits selon des procédés modernes, sûrs et écologiques, de façon économique et conformément à des normes de qualité élevées.

## Avis d'expert et information

Vous trouverez dans notre site internet, sous [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch), un aperçu de toutes les expertises/toute la littérature disponibles sur la préparation gigasept® pearls.

Pour vos questions individuelles:

Customer Sales Service

Tél.: +41 44 466 55 44

E-mail: [mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)



EMAS  
GEPRIEFTES  
UMWELTMANAGEMENT  
REG. NR. 01-160-10003



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.



Une société du groupe Air Liquide

schülke Suisse  
Schülke & Mayr AG  
Sihlfeldstr. 58  
8003 Zürich, Suisse  
Tél +41 (0) 44 - 46655 - 44  
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

schülke siège principal  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Allemagne  
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)