

Désignation	LINGETTES IMPREGNEES D'UNE SOLUTION DESINFECTANTE MEDIBASE																																								
Référence	La boîte de 100 lingettes	3131820																																							
	Le sachet recharge de 100 lingettes	3131821																																							
Photo produit																																									
Description produit	Lingettes imprégnées d'une solution désinfectante idéales pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux non-invasifs et non immergeables (petit matériel médical et dentaire). Testées sous contrôle dermatologique.																																								
Caractéristiques et compositions	■ Usage sur les surfaces lisses et le petit matériel médical ■ Lingettes particulièrement grandes, épaisses, résistantes et douces. ■ Moins de 5% d'agents de surface non ioniques, parfum dont limonène, désinfectants : Ethanol, Alkyl, Dimethylbenzylammonium chloride, Propan-2-ol.																																								
	<table><tr><th colspan="2">ACTIVITE MICROBIENNE</th><th>TEMPS DE CONTACT</th></tr><tr><td colspan="3">Traitement Général</td></tr><tr><td>Bactéricide</td><td>EN13727* - EN14561</td><td>5min</td></tr><tr><td></td><td>EN14561: MRSA</td><td>5min</td></tr><tr><td>Fongicide</td><td>EN14562: Aspergillus fumigatus</td><td>5min</td></tr><tr><td>Levuricide</td><td>EN13624 - EN 14562: Candida albicans</td><td>5min</td></tr><tr><td>Tuberculocide</td><td>EN14348 - EN 14563 : Mycobacterium terrae</td><td>15min</td></tr><tr><td>Virucide</td><td>EN14476* : HBV - HCV - Adenovirus Coronavirus - Novovirus - VRS - H1N1 - HSV1</td><td>1min</td></tr><tr><td></td><td>EN14476: Polyomavirus</td><td>1min</td></tr><tr><td></td><td>EN14476: Rotavirus</td><td>15min</td></tr><tr><td colspan="2">Usages additionnels</td><td></td></tr><tr><td>Bactéricide</td><td>EN1276</td><td>30s</td></tr><tr><td></td><td>EN13697</td><td>5min</td></tr></table>		ACTIVITE MICROBIENNE		TEMPS DE CONTACT	Traitement Général			Bactéricide	EN13727* - EN14561	5min		EN14561: MRSA	5min	Fongicide	EN14562: Aspergillus fumigatus	5min	Levuricide	EN13624 - EN 14562: Candida albicans	5min	Tuberculocide	EN14348 - EN 14563 : Mycobacterium terrae	15min	Virucide	EN14476* : HBV - HCV - Adenovirus Coronavirus - Novovirus - VRS - H1N1 - HSV1	1min		EN14476: Polyomavirus	1min		EN14476: Rotavirus	15min	Usages additionnels			Bactéricide	EN1276	30s		EN13697	5min
	ACTIVITE MICROBIENNE		TEMPS DE CONTACT																																						
	Traitement Général																																								
	Bactéricide	EN13727* - EN14561	5min																																						
		EN14561: MRSA	5min																																						
	Fongicide	EN14562: Aspergillus fumigatus	5min																																						
	Levuricide	EN13624 - EN 14562: Candida albicans	5min																																						
	Tuberculocide	EN14348 - EN 14563 : Mycobacterium terrae	15min																																						
	Virucide	EN14476* : HBV - HCV - Adenovirus Coronavirus - Novovirus - VRS - H1N1 - HSV1	1min																																						
		EN14476: Polyomavirus	1min																																						
		EN14476: Rotavirus	15min																																						
	Usages additionnels																																								
	Bactéricide	EN1276	30s																																						
	EN13697	5min																																							

		Fongicide	EN13697: Aspergillus niger	5min
		Levuricide	EN1650* - EN 13697: Candida albicans	5min
		*En conditions de saleté		
Packaging	- La boîte de 100 lingettes - Le sachet recharge de 100 lingettes			
Durée de vie	A utiliser dans les 3 mois après ouverture.			
Indications d'utilisation	LOT Lingettes prêtes à l'emploi à usage unique. Lors de la mise en service de la boîte : 1. Enlever le capot, 2. Retirer définitivement l'opercule, 3. Passer la lingette centrale dans l'orifice du capot avec des mains propres puis 4. Remettre en place le capot. 5. Passer la lingette sur le matériel. 6. Laisser agir 30 secondes à 15 minutes selon l'activité antimicrobienne recherchée. 7. Laisser sécher à l'air libre. 8. Ne pas rincer. 9. Refermer le clapet après chaque utilisation afin d'éviter le dessèchement des lingettes.			
Informations légales	Dispositif médical de classe IIA sous la directive européenne 93/42/CEE incluant la Directive 2007/47/CEE Marquage CE 0459. Organisme certificateur : G-MED. Fabricant FELT S.A			

Version 2.0

Mise à jour 2020/10/23 Marion CHABANAT