

# Information produit

## Orotol® Combi-Set



### Orotol® Combi-Set - breve descripción

- Orotol® Combi-Set comprend Orotol® plus et le nettoyant spécial MD 555 cleaner pour le nettoyage et la désinfection complets des systèmes dentaires d'aspiration, des séparateurs d'amalgame et des crachoirs.
- Orotol® plus: préparation pour la désinfection et le nettoyage avec un large spectre d'action. La solution pour les systèmes d'aspiration contaminés – protection sûre contre les infections.
- Testé selon les méthodes actuelles de la VAH et les normes européennes. Liste VAH.
- MD 555 cleaner: nettoyant spécial non-moussant pour les systèmes dentaires d'aspiration et leurs écoulements lorsque la qualité de l'eau pose problème (exemple: dureté élevée de l'eau, sels peu solubles, etc.) ainsi qu'en cas de pente insuffisante des tuyaux d'écoulement et pour dissoudre des résidus de poudres prophylactiques, des produits sous forme de perles.
- Orotol® Combi-Set: 3 x 2,5 l d'Orotol® plus et 1 x 2,5 l de MD 555 cleaner.

### Propriétés

Orotol® plus et MD 555 cleaner du système d'hygiène Dürr sont des concentrés pour la désinfection, la désodorisation, le nettoyage et l'entretien de tous les systèmes dentaires d'aspiration, des séparateurs d'amalgame et des crachoirs. Les composants désinfectants et nettoyants sélectionnés pour Orotol® plus garantissent un entretien intensif sans mousse qui ménage les matériaux et l'environnement. L'utilisation de MD 555 cleaner est recommandée lorsque la qualité de l'eau pose problème (exemple: dureté élevée de l'eau, sels peu solubles, etc.) ainsi qu'en cas de pente insuffisante des tuyaux d'écoulement. MD 555 cleaner est en outre préconisé en cas d'utilisation d'appareils spéciaux de nettoyage dentaire, comme par exemple les appareils à jet de poudre. Utilisé régulièrement, MD 555 cleaner prévient la formation des dépôts dans les systèmes d'aspiration. L'obstruction des systèmes d'aspiration par les produits de prophylaxie peu solubles tels que les poudres de prophylaxie ou les produits spéciaux sous forme de perles à base de carbonate de calcium est évitée et les dépôts existants sont éliminés. La combinaison d'Orotol® plus et MD 555 cleaner garantit une utilisation techniquement et hygiéniquement parfaite des systèmes d'aspiration.

### Composition du produit

Orotol® plus est une combinaison de composés d'ammonium quaternaire, d'agents nettoyants alcalins, d'agents complexants, d'agents antimousse et d'adjuvants en solution aqueuse. 1100 g d'Orotol® plus contiennent 4,4 g de chlorure de diméthyl-diocetyl-ammonium, 0,6 g de chlorure de benzyldiméthyl-dodécylammonium. MD 555 cleaner contient des acides organiques (> 30 %), des agents tensioactifs non moussants (<5 %), des inhibiteurs de corrosion, un indicateur de couleur et des adjuvants en solution aqueuse.

### Efficacité microbiologique

Orotol® plus est bactéricide<sup>1)</sup>, levuricide<sup>1)</sup>, virucide à action limitée (virus enveloppés tels que VHB, VHC et VIH<sup>2), 3)</sup> ainsi que les virus nus tels que adénovirus<sup>4)</sup> et norovirus<sup>1)</sup>). Liste VAH. Produit contrôlé selon les normes EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 16615.

# Information produit

## Orotol® Combi-Set

- 1) Test avec forte charge (VAH, EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562, EN 14476).
- 2) Test avec et sans charge conformément aux directives DVV/RKI.
- 3) Conformément aux recommandations de l'Institut Robert Koch (RKI) (Bulletin du Ministère allemand de la Santé, 60, 353 - 363, 2017).
- 4) Test avec faible charge. Charge élevée: 2 %/2 h, 4 %/15 min

### Utilisation

Orotol® plus est utilisé à une concentration de 2 %. Ajouter de l'eau froide à 20 ml d'Orotol® plus pour obtenir 1 litre et aspirer à l'aide d'OroCup. Nous recommandons un traitement à la fois nettoyant et désinfectant du système d'aspiration avec Orotol® plus une à deux fois par jour – utilisation unique: en fin de traitement uniquement – selon la charge présente. MD 555 cleaner s'utilise à une concentration de 5 % une à deux fois par semaine, par exemple pendant la pause de midi, en cas de dureté élevée de l'eau ou d'utilisation de poudres de prophylaxie. Utiliser le produit une fois par jour en cas de souillures importantes. La durée d'action la plus courte est de 30 minutes et peut être prolongée en cas de besoin. Dans les cas problématiques, comme par exemple l'assainissement d'un système d'aspiration chargé en biofilm, utiliser MD 555 cleaner à une concentration de 10 % une à cinq fois par semaine – ici en alternance avec Orotol® plus. L'efficacité optimale est obtenue avec une durée d'action de 1 à 2 heures. Après et entre deux utilisations de MD 555 cleaner et Orotol® plus, rincer soigneusement le système d'aspiration avec de l'eau. Les cycles de nettoyage et de désinfection ne doivent pas se succéder immédiatement.

### Comportement écologique

Orotol® plus est facilement biodégradable conformément à la directive OCDE 301 D. L'emballage composé de polyéthylène est recyclable en tant que matière première ou source d'énergie thermique. Rincer la bouteille à l'eau pour le recyclage. MD 555 cleaner est sans risque pour l'environnement, étant donné que tous les composants organiques sont rapidement et complètement biodégradables. L'emballage est en polyéthylène et peut donc être recyclé en tant que matière première ou exploité en tant que source d'énergie thermique. Rincer la bouteille à l'eau pour le recyclage.

### Durée de conservation

3 ans

### Distribution

Dürr Dental SE  
Höpfigheimer Str. 17  
74321 Bietigheim-Bissingen  
Germany  
www.duerrdental.com  
info@duerrdental.com

### Fabricant

orochemie GmbH + Co. KG  
Max-Planck-Straße 27  
70806 Kornwestheim  
Germany  
www.orochemie.de  
info@orochemie.de

### Conditionnement

Orotol® Combi-Set: carton de 3 x 2,5 l d'Orotol® plus et 1 x 2,5 l de MD 555 cleaner

### Conservation

Conserver le produit à des températures supérieures à 5 °C, mais ne dépassant pas une température ambiante normale.

### Accessoires

OroCup

### Remarques générales

Voir les informations produits d'Orotol® plus et de MD 555 cleaner pour des informations plus détaillées concernant les deux préparations. Après toute intervention chirurgicale, aspirer par à-coups de l'eau froide. Ne pas laisser agir MD 555 cleaner pendant la nuit.

### Indications de danger

Orotol® plus et MD 555 cleaner sont soumis à la classification et signalisation selon le règlement CLP: voir l'étiquetage et la fiche de données de sécurité du produit.

### Rapports d'expertise indépendants et propres études

Les rapports d'expertise sont disponibles sur demande.

Orotol® plus  0124

MD 555 cleaner 